



Rekonditioneringsanvisning för gästolarna: Meywalk 4, Micro, Mini, Small, Medium, Large

Observera!

Gästolarnas utseende kan variera beroende på modell, storlek och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.

Gästolens olika delar



Rengöring av gästolen i hemmiljö

Tvätta av gästolen med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Torka av med torr trasa. Vid behov kan också desinfektionsprit användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från gästolen. Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Rengöring av Meywalk 4 på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Meywalk 4 kan rengöras i tvättkabinett med program innehållande tvätt i 60°C under 3 min och tvätt i 90°C under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka gästolen genom att dela /lyfta av sittenheten och placera de öppna rörändarna neråt så att avrinning sker.



Rekonditioneringsanvisning för gåstolarna: Meywalk 4, Micro, Mini, Small, Medium, Large

Montera ihop gåstolen

Meywalk 4:ans fjäder sitter kvar i nedre chas-siramen vid en delning. Kontrollera alltid att fjädern finns på plats i vardera rören efter en delning.



Byte av skumrör

Byte av skumrör på bakre bålstödsringen och rumpstopp på Meywalk 4. Allt skadat, spruckit skumrör eller plastdetaljer skall bytas ut mot nytt, se reservdelar för respektive storlek och modell.

Montera av respektive del från gåstolen. Avlägsna alla gamla rester. Använd tryckluft för att trycka på det nya skumröret. Talk på insidan av skumröret kan underlätta vid byte.

Byt ut

Delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas. Önskar man bättra på med samma färg som på gåstolsramen kan lackfärg beställas.

Gör rent länkhjulen:

Runt länkhjulen samlas mycket smuts som damm, hår mm. Smutsen gör att gåstolen blir trög att köra. Tänk på att ta bort/ rengöra hjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av hjulen.
Borsta rent.
Montera tillbaka hjulen.



Kontrollera att hjulen rullar lätt framåt. Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.

Kontrollera innan användning att:

- Tippstöden fungerar och är rätt placerade i höjd.
- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Gåstolen rullar rakt då den rullas framåt.
- Parkringsbromsarna fungerar.
- Hävbygeln kan sänka sadeln.
- Hävbygeln kan låsas fast i uppfällt läge.