



VELA Meywalk 4



VELA Meywalk 4 Large



VELA Meywalk 4 Medium



VELA Meywalk 4 Small



VELA Meywalk 4 Micro

VELA Meywalk 4 är en serie gåstolar som gör det möjligt för barn och vuxna att gå säkert på egen hand trots nedsatt eller obefintlig gångförmåga. Användaren får möjlighet att möta omvärlden i ögonhöjd och uppnå en aktiv vardag med social delaktighet, rörlighet och fysiskt välbefinnande – och dessutom är VELA Meywalk 4 enkel att använda.

VELA Meywalk 4 är utformad för att motivera till rörelse, samtidigt som kroppens naturliga rörelsemönster stimuleras och understöds. Det unika fjädrande chassit och den dynamiska sitsen följer kroppens rörelser och möjliggör optimalt funktionellt stöd i gångens olika faser. Det stödjande kroppsstödet säkerställer en god kroppshållning vid aktivitet och rörelse.

In- och utstigning har gjorts enkel och säker för både användare och assistent. Gåstolen bromsas och sitsen sänks till användarens sitthöjd, så att användaren enkelt och säkert kan förflytta sig till och från gåstolen med minimal assistans. Sitsen höjs enkelt med hjälp av den inbyggda lutningsstängan.

Användaren kan ha händerna fria i gåstolen och därmed delta i aktiviteter, till exempel att äta eller dricka självständigt i stående position. Det skapar glädje och lägger grunden för vidare utveckling. Användaren kan även få extra stöd och stabilitet i stående ställning via ett handstyre som kan vinklas efter behov.

Det finns många fördelar med att dagligen komma upp i stående eller gående ställning. De fysiska vinsterna omfattar bland annat förbättrad balans, ökad styrka i muskler och skelett, bibehållen rörlighet och ökad uthållighet. Den mobilitet som användaren uppnår med en VELA Meywalk 4 stimulerar andning, cirkulation och matsmältning – då daglig rörelse främjar aptiten, ger bättre sömn och ökat välbefinnande som i sin tur ger överskott till andra aktiviteter.

FÖRDELAR

- :: VELA Meywalk 4 stimulerar och understöder kroppens naturliga rörelsemönster
- :: Användaren kan stå eller gå trots nedsatt eller obefintlig ståfunktion
- :: Kan "växa" med användaren tack vare steglös justering av sitthöjd och kroppsstöd
- :: Enkel att justera utan verktyg – särskilt praktiskt vid användning av flera användare
- :: Delbar och enkel att transportera vid användning på flera platser

STANDARDKONFIGURATION



	VELA Meywalk 4 Micro	VELA Meywalk 4 Small	VELA Meywalk 4 Medium	VELA Meywalk 4 Large	
TEKNISKA DATA	Längd:	77 cm	85 cm	86 cm	100 cm
	Bredd, yttre mått:	51 cm	62 cm	62 cm	68 cm
	Bredd, inre mått:	42 cm	49 cm	50 cm	57 cm
	Sitsbredd:				
	Framkant	7 cm	9 cm	10 cm	10 cm
	Mitten	5,2 cm	7,5 cm	7,2 cm	7,2 cm
	Bakkant	11,5 cm	13,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
	Sitsdjup	24 cm	27 cm	32,5 cm	32,5 cm
	Sitthöjd/steglängd	25-45 cm	44-67 cm	60-84 cm	80-104 cm
	Höjd på kroppsstöd*	52-65 cm	74-99 cm	101-133 cm	120-152 cm
	Storlek på kroppsstöd (väljs utifrån användarens mått)	70, 90 cm	70, 90, 105 og 120 cm	70, 90, 105, 120 og 130 cm	70, 90, 105, 120 og 130 cm
	Vikt utan tillbehör	13 kg	25 kg	32 kg	34 kg
	Max. belastning	60 kg	100 kg	130 kg	130 kg
	Viktintervall (fjäderfärg) (väljs utifrån användarens mått)	10-15 kg (orange) 15-20 kg (lila) 20-50 kg (vit) 45-65 kg (gul)	20-50 kg (vit) 45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå)	45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå) 80-100 kg (röd) 100-130 kg (silver)	45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå) 80-100 kg (röd) 100-130 kg (silver)
	Färg på gästol	Svart	Grön	Röd	Svart
	Ram	Aluminium	Stål	Stål	Stål
	Broms	Ja	Ja	Ja	Ja
	Motståndsbroms.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Backspärr	Ja	Ja	Ja	Ja
	Beställningsnummer	MS014000	MS013000	MS011200	MS011250

* Sitthöjder anges vid halv fjäderkompression.

Standardstorlekar anges i **fet**

Alla VELA Meywalk 4-gästolar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Gästolen levereras som standard med vadderade delar i konstläder och polyuretanskum – slitstarka, lättstädade material som enkelt kan desinficeras.

TILLBEHÖR OCH SPECIALLÖSNINGAR

Alla VELA Meywalk 4-gästolar kan anpassas individuellt med rätt tillbehör – till exempel höftstöd eller magkudde, som ger extra stabilitet och förbättrad kroppshållning.

Komplett tillbehörslista med artikelnummer, bilder och beskrivningar finns på vela-stolar.se

ARBETSMILJÖ

Alla inställningar kan göras utan verktyg – en praktisk lösning i vardagen, särskilt på institutioner med flera användare.

Den inbyggda lutningsstängan sänker sitsen, så att användaren enkelt kan förflytta sig från sittande position till gästolen, vilket gör in- och utstigning enkel för både användare och assistent. Det är även möjligt att använda lyft vid förflyttning i VELA Meywalk 4.