

KRABAT PILOT

BRUKSANVISNING

NORSK



CE

HEPRO



Forord

Krabat er vår egen merkevare for hjelpemidler for barn og unge.

Historien til Krabat startet i 2003 da Tom Arne Solhaug ble far til Kasper som ble født med cerebral parese. Gjennom flere år økte frustrasjonen over tilgjengelige hjelpemidler, og ikke minst ønsket om hjelpemidler som ikke eksisterte. I 2006 ble Krabat startet av Tom Arne og Fredrik Brodtkorb for å lage hjelpemidler de mente manglet.

Gjennom årene har produktporteføljen blitt utvidet, og i dag tilbyr vi et bredt spekter av egenutviklede tekniske hjelpemidler av høy kvalitet for barn og unge. Våre produkter er nyskapende, funksjonelle og estetisk tiltalende. De er utviklet i samarbeid med barn, foreldre og fagpersonell. I vårt team har vi egne fysioterapeuter, ergoterapeuter, idustriesignere og teknikere. Vi inngår aldri kompromisser på bekostning av funksjon, estetikk eller kvalitet.

I 2018 ble Krabat kjøpt opp av Addlife og fusjonert med Hepro som har lang erfaring i utvikling av tekniske hjelpemidler for eldre og velferdsteknologi.

Denne bruksanvisningen er skrevet for at du skal bli kjent med ditt nye Krabat-produkt og gjelder for følgende modeller:

- Krabat Pilot

Bruksanvisningen inneholder nyttige tips om bruk og innstilling av produktet, advarsler knyttet til bruk av produktet, samt informasjon om renhold og vedlikeholdsrutiner for å sikre at du får størst mulig utbytte av produktet.

VIKTIG!

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk

Innhold

Forord	3
Innhold	5
Symbolforklaring	6
Tekniske spesifikasjoner	7
1.0 Generelt	8
2.0 Hoveddeler	10
3.0 Bruk	11
3.1 Justering av høyde	11
3.2 Justering av brett	11
3.3 Justering av gassfjær	12
4.0 Tilbehør	13
5.0 Vedlikehold	14
6.0 Individuell justering og tilpasninger	15
7.0 Advarsler og definisjoner	16
7.1 Generelle advarsler	16
7.2 Sikkerhet	17
8.0 Transport og lagring	18
9.0 Miljømessige påvirkninger ved bruk	19
10.0 Garanti	20
11.0 Revisjoner av denne bruksanvisning	22





Symbolforklaring

	Produsent	Angir produsenten av medisinsk utstyr.
	Produksjonsdato	Indikerer datoen da den medisinske anordningen ble produsert.
	Serienummer	Indikerer produsentens serienummer, slik at en spesifikk medisinsk anordning kan identifiseres.
	Medisinsk enhet	Indikerer at artikkelen er en medisinsk anordning.
	Se bruksanvisning	Advarsel: Les alle advarsler og sikkerhetsregler i bruksanvisning.
	Generelt fareskilt	
	Generelt fareskilt	Indikerer behovet for at brukeren konsulterer bruksanvisningen for viktig sikkerhetsrelatert informasjon f.eks. advarsler og forholdsregler som av ulike årsaker ikke kan presenteres på selve den medisinske anordningen.
	Medisinsk elektrisk utstyr - Pasientnær del av type BF	I identifiserer en pasientnær del av type BF i samsvar med IEC 60601-1.
IPN ₁ N ₂	Grad av beskyttelse mot inntrengning	Det første tallet indikerer nivået av beskyttelse som kabinettet gir mot inntrengning av faste fremmedlegemer. Det andre tallet indikerer nivået av beskyttelse for utstyret i kabinettet mot inntrengning av væsker.
	Kun til innendørs bruk	Identifiserer at utstyret er designet primært for innendørs bruk.
	Risikoklasse 2	Identifiserer at deler av utstyret møter sikkerhetskravene klassifisert for klasse 2 elektrisk utstyr.
	CE merke	Indikerer europeisk teknisk samsvar.
	Resirkuler: Elektronisk utstyr	Separat innsamling for elektrisk og elektronisk utstyr.
	Unngå å sitte på flaten	Ikke sitt direkte på flaten dette merket er festet på.
	Unngå å stå på flaten	Ikke stå direkte på flaten dette merket er festet på.

Tekniske spesifikasjoner

	Beskrivelse	Størrelser
A	Innvendig bredde	30 cm
B	Bredde på brett	25 cm
C	Lengde på brett	21 – 28 cm
D	Total bredde	39 cm
E	Høyde	15 – 21 cm
F	Total lengde	31 cm
	Vekt	1,9 kg
	Alder	Fra ca 9 mnd
	Maks brukervekt	25 kg

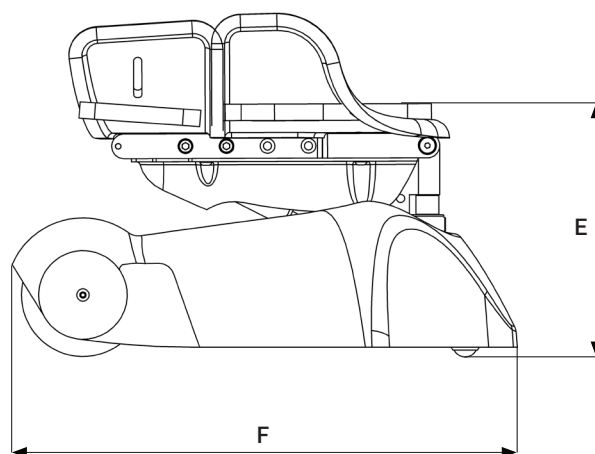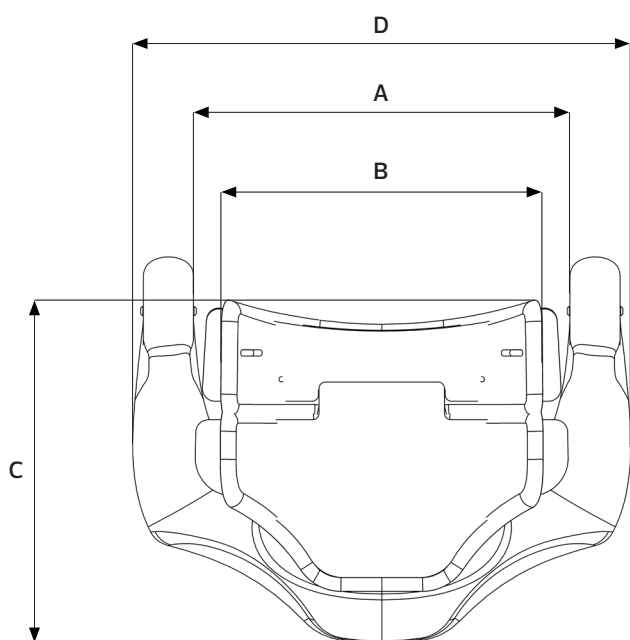

1. Generelt

Krabat Pilot er et innovativt og annerledes forflytningshjelpemiddel.

Tradisjonelle krabbehjelpemidler gir i liten grad barnet aktiv hjelp til å løfte hoftene, det gjør Krabat Pilot.

Når barnet får hjelp til å løfte hoftene er det lettere å få knærne under seg og dermed lettere og forflytte seg. Løftebevegelsen som Krabat Pilot gir er dynamisk, og endrer seg hele tiden når barnet beveger seg. Ved å bruke krabbe og posisjoneringsutstyret Co-Pilot får barnet den friksjon som trengs mot underlaget og regulerbare strikker som kan alternere benbevegelse, korrigere barnet tilbake i 4-fotstående og forhindre hofteabduksjon.

Krabat Pilot krever individuell utprøving og tilpasning.

- Maksimum brukervekt Krabat Pilot: 25 kg!
- Kan brukes fra ca. 9 måneders alder

1.1 BEVEGELSE

Krabat Pilot er et hjelpemiddel for posisjonering i 4-fotstående, forstadier til krabbing og forflytning. Piloten gir en utgangsstilling som stimulerer til lek og deltagelse ved at barnet kommer opp fra gulvet. Vektbæring på hofterledd og skulderledd er svært viktig for barnets motoriske utvikling.

Det er fordelaktig å starte med Krabat Pilot tidlig mens barnet er motivert for å jobbe med 4-fotstående og krabbing. Hjelpemiddelet gir et dynamisk løft av barnets hofter, som kan endres etter barnets vekt og aktivitetsnivå. Høyden kan også endres slik at Krabat Pilot passer for barn av forskjellig størrelse, der hovedgruppen er mellom 1 og 5 år.

Krabat Pilot har trinnløs høydejustering og justerbar lengde på brettet. Styrken på gassfjæren som justerer løftet på hoftene kan enkelt tilpasses den enkelte bruker. Den optimale konfigurasjonen for hvert barn med riktig høyde, lengde på brettet og styrke på gassfjæren som løfter hoftene, bestemmes ved en utprøving.

Det er enkelt å ta barnet ut og inn av hjelpemiddelet. Barnet er heller ikke fastspennet (annet enn med reim under baken), og kan bevege seg relativt fritt. Dette er viktig både for trivsel og for krabbebevegelsen.

Krabat Pilot er utformet slik at det er minimal risiko for at fingre kommer i klem under hjulene ved bruk. Flaten mot barnet er mykt og enkelt å holde rent.

Krabat Pilot har et moderne og gjennomtenkt design, og er kompakt og enkelt å ta med seg.



2. Hoveddeler



Fig. 01
Krabat Pilot

Krabat Pilot med manuell høydejustering har følgende hoveddeler:

- 01** Justerbar vugge for å plassere barnet trygt i under bruk
- 02** Nedre hovedkonstruksjon som styrer retningen på krabbehjelpemiddelet
- 03** Justerbar setestropp som holder barnet i riktig posisjon
- 04** Retningsstyrte hjul
- 05** Høydejustering
- 06** Feste for Krabat Co-Pilot (ekstrauststyr)

3. Bruk

3.1 JUSTERING AV HØYDE



Fig. 03a
Trinnløs justering, laveste mulighet



Fig. 03b
Trinnløs justering, høyeste mulighet

3.2 JUSTERING AV BRETT



Fig. 04
Brettet kan tilpasses slik at det gir tilstrekkelig støtte for barnet

3.3 JUSTERING AV GASSFJÆR



Fig. 05a
Gassfjær i posisjon med mest løft



Fig. 05b
Gassfjær i posisjon med middels løft



Fig. 05c
Gassfjær i posisjon med lite løft

4. Tilbehør

God og riktig friksjon på knærne er viktig for krabbing. Krabat Co-Pilot er knebeskyttere utviklet spesielt for å gi god friksjon mot underlag som parkett og gulvbelegg når barnet bruker Krabat Pilot.

Krabat Co-Pilot leveres med strikk som festes mellom barnet og hjelpemiddelet, og/eller mellom knærne til barnet. Resultatet med denne løsningen blir at barnet kan få hjelp av seg selv til å forflytte knærne frem under krabbing. Strikken reduserer hofteabduksjon og leder barnet tilbake i krabbestilling ved spastisitet.

I tillegg til Co-pilot finnes det mer tilbehør tilgjengelig, f.eks nye puter, vester og reimer. Se www.hepro.no for en oppdatert liste over tilbehør. Alt tilleggsutstyr har egen bruksanvisning som følger utstyret.

Ved behov for tilleggsutstyr, annet utstyr eller innstilling av ditt produkt ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentralen, din lokale fysio- eller ergoterapeut eller en representant fra Hepro.



Fig. 02 a
Krabat Co-Pilot



Fig. 02 b
Reim over rygg



Fig. 02 c
Pilot sele

5. Vedlikehold

Alle metall- og plastdeler kan rengjøres med mildt såpevann. Liggevuggen er dekket med skummateriale, og kan rengjøres med enten en klut og såpevann eller vaskes i maskin på 40 grader. Ved behov kan det kjøpes nye, som enkelt byttes ut og kan fint gjøres på egenhånd.

Krabat-produktene er et personlig produkt, individuelt tilpasset i henhold til medisinske krav og krav fra bruker. Regelmessig vedlikehold av produktet er ikke nødvendig. Vask produktets komponenter ved behov. Følg vanlige hygieneråd og hold produktet rent til enhver tid.

Putene er festet til produktet med borrelås. Råd om fjerning av flekker finner du på www.hepro.no.

Kulelager og andre bevegelige deler er vedlikeholdsfrie og skal ikke smøres.

For å unngå skade skal ingen del av produktet repareres eller vedlikeholdes mens det er i bruk.

Merk: Hvis man skulle oppleve at deler blir ødelagt eller er åpenbart skadet, må du slutte å bruke produktet og kontakte autorisert personell for service eller for å få veiledning om korrigerende tiltak.

Dette produktet er IKKE til bruk i spesielle miljøer. Normal rengjøring som beskrevet i brukerhåndboken – Ingen sterilisering (!)

Dette produktet er IKKE egnet for bruk i et oksygenrikt miljø (!)

6. Individuell justering og tilpasninger

Dersom barnet vokser ut av produktet, endrer sittemønster eller av andre grunner har behov for justering eller individuell tilpassing, ta kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut eller hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Tilpassing av produkt må gjøres av kvalifisert personell eller representanter fra Hepro AS.

Gjør under ingen omstendigheter modifikasjoner eller endringer på produktet.

7. Advarsler og definisjoner

7.1 GENERELLE ADVARSLER

Kvelningsfare:

Ved normal bruk, når bruker sitter på setet og evt er sikret, er det ingen fare for kvelning. Hvis bruker ikke sitter på setet og befinner seg i nærheten av produktet, er det liten eller ingen mulighet for kvelning. For å unngå mulig kvelningsfare må du ikke la et barn bruke produktet uten tilsyn.

Klemfare:

Det er liten fare for klemskader ved normal bruk, så lenge prosedyrene for justering er fulgt. Hvis noen skulle være plassert nær bevegelige deler når produktet er i bruk, er det en mulig klemfare i nærheten av hjul o.l. eller mulighet for å putte fingre i åpninger i produktet. For å redusere mulighet for hendelser som kan medføre klemfare eller at man blir sittende fast må man forsikre seg at ingen befinner seg u hensiktsmessig nær produktet når det er i bruk av en annen.

Dersom skruer og andre bevegelige deler ikke er strammet nødvendig til, kan det forekomme bevegelser på produktet – som igjen kan utgjøre klemfare. For å forhindre mulighet for slike hendelser må man aldri forlate barnet i produktet uten tilsyn. For elektriske produkter kan man som et kontrolltiltak for å unngå klemfare og mulighet for at noen blir sittende fast under produktet, fjerne batteri når produktet ikke er i bruk.

Tippefare:

Det er alltid en reell fare for at et produkt kan tippe, så lenge man ikke forholder seg innenfor begrensninger satt av terapeut med opplæring fra Hepro, informasjon som fulgte produktet eller informasjon tilgjengelig på våre nettsider. En generell regel er at all bevegelse utenfor «fotavtrykket» til produktet mot underlaget, kan utgjøre fare for tipp. Jo høyere bruker er, vil også påvirke muligheten for tipp. Det samme gjelder ekstra komponenter påmontert, som f.eks. bord, kommunikasjonsverktøy, fotstøtter og sekk/bag. For å forhindre mulighet for slike hendelser må man ta hensyn til dette, samt aldri forlate barnet i produktet uten tilsyn.

Definisjonen på deler brukt er deler av produktet som kommer i kontakt med BRUKEREN ved normal bruk / for å utføre sin funksjon.

Definisjon på deler brukt kan være: Styre, bremsespaker/-hendler, sitteenhet og stolrygg inkludert puter, fotstøtte/fotbrett inkludert ankelstroppe/ankelmansjetter, bekkenstøtte, sidestøtter, hoftebelte, hodestøtte, bord, kjørehåndtak, krabbeenhet inkludert puter, reimer og vester hvis montert.



7.2 SIKKERHET

Alle produkter i Krabat-serien er CE merket i henhold til MDR 2017/745 og 93/42 / EØF, klasse 1 av 14 juni 1993 - Medisinsk utstyrsdirektiv.

Dette sertifiserer at den oppfyller alle relevante europeiske sikkerhetskrav. Denne bruksanvisningen er godkjent i henhold til disse standardene.

Levetiden til produktet er på ca. 5 år under normal bruk. Etter ca. 5 år bør produktet bli renovert av Hepro AS eller en godkjent partner for å forlenge produktets levetid. All service må utføres av Hepro eller en autorisert partner.

Produkter med elektriske komponenter SKAL sendes til Hepro for en teknisk gjennomgang / overhaling før den sendes ut for å brukes igjen.



Dersom produktet brukes på annen måte enn terapeut har anbefalt, kan dette være til skade for brukeren.



CE-merket skal fjernes hvis produktet er modifisert, eller ikke-originale deler brukes!



Justeringer som ikke er beskrevet i denne manualen skal kun utføres av Hepro, eller av personell godkjent av Hepro.



Krabat-produkter er ikke leker! Feil bruk kan forårsake skade på både bruker og/eller produktet.



Dersom deler skulle gå i stykker eller er åpenbart skadet, må ikke stolen brukes!



Dersom feil skulle oppstå med håndkontroll, batteri, lader eller annet elektrisk utstyr, stans bruk umiddelbart og ta kontakt med Hepro for utbedring.

8. Transport og lagring

Ved transport og/eller lagring, bør produktet forbli operativ i normal bruk innenfor sine spesifikasjoner etter transport eller lagring i følgende temperaturområder:

- -25 °C to +5 °C, og
- +5 °C to +35 °C ved relative luftfuktighet opptil 90%, ikke kondenserende;
- >35 °C to 70 °C ved vanndamptrykk opp til 50 hPa

Merk: Produkter beregnet på innendørs bruk skal oppbevares innendørs.

9. Miljømessige påvirkninger ved bruk

Når produktet skal tas i bruk skal det brukes under følgende miljømessige betingelser:

- I temperatur mellom + 5 °C til + 40 °C;
- Ved relativ luftfuktighet på 15 % til 93 %, ikke kondenserende
- Ved et atmosfærisk trykk mellom 700 hPa til 1 060 hPa

Gjelder elektriske produkter:

Dette produktet er klassifisert for ikke-kontinuerlig drift.

Normal driftssyklus for bruk – 10% eller 2 minutters drift etterfulgt av 18 minutters stillstand.

Bruk etter lagring:

Hvis produktet er lagret kaldt (under 0 grader Celsius), må man vente 20 minutter før det tas i bruk.

Hvis produktet er lagret på et varmt sted (over 50 grader Celsius), må man la alle overflater avkjøles til omgivelsenes temperatur før en setter barnet i produktet. Vent 20 minutter før produktet tas i bruk.

Unngå brannskader skolding:

Hvis produktet er etterlatt i direkte sollys, flytt det bort fra direkte sollys og kontroller at alle overflater har oppnådd en akseptabel temperatur før du plasserer barnet i produktet.

Tips: For å unngå at overflater blir for varme, kan produktet tildekkes med et teppe for å skjerme overflatene for direkte sollys.

Resirkuler komponenter og materialer i henhold til lokale, statlige og nasjonale forskrifter.

Levetid/ service life:

Produktets forventede levetid, forutsatt normal bruk, er 5 år.

Merk: Etter ca. 5 år kan produktet bli renoveret for evt. videre bruk, dette må avgjøres av Hepro AS.

Dersom produktet skal renoveres/ gjenbrukes skal renovering og evt. oppgradering kun utføres av Hepro AS eller en av Hepro AS godkjent partner for å forlenge produktets levetid.

Gjenvinning/ End-of-life:

Når produktet ikke lenger kan brukes skal det demonteres og gjenvinnes, dette skal gjennomføres av produkteier. Dersom produkteier ikke har muligheten til dette skal produktet sendes til Hepro AS for demontering og gjenvinning.

Del	Materiale	Gjenbrukbart	Gjenvinnbart	Sorteres som
Ramme / bærende enhet	PC/PMMA	Ja	Nei	Plast
Ramme, brett	6063-T6	Ja	Ja	Metall/ aluminium
Hjul (faste)	PUR	Ja	Ja	Plast/ PUR
Hjul (roterende)	ABS/ Stål	Ja	Ja*	Plast/ ABS/ Stål
Brett	ABS	Ja	Ja	Plast/ ABS
Puter	PUR foam	Ja	Ja	Plast/ PUR (skum)
Trekk	Neopren	Ja**	Nei	Restavfall
Seler/ vester	Div.	Ja**	Nei	Restavfall

*: Komponenten består av flere deler av forskjellig materiale. Dersom disse tas fra hverandre kan hver enkeltkomponent gjenvinnes. Dersom dette ikke gjøres skal delen sorteres som restavfall.

** : Tekstiler og seler består ofte av flere komponenter av forskjellig materiale. Dersom disse tas fra hverandre kan noen av komponentene gjenvinnes, andre ikke.

Dersom enkeltkomponentene ikke skilles fra hverandre skal delen sorteres som restavfall.

Merk: Dersom komponenter består av flere deler som er montert sammen og disse ikke kan skilles fra hverandre, og en av disse delene består av metall, skal hele komponenten sorteres som metall.

10. Garanti

Hepro gir en garanti på 2 år for alle produkter. Denne garantien er rettet mot defekter i utførelse eller materialer. Garantien kan reduseres eller frafalle hvis service eller daglig vedlikehold ikke overholdes. Det er kundens ansvar å sørge for at vedlikehold utføres.

Garantien dekker ikke utilsiktet skade, inkludert skade forårsaket av feil bruk eller manglende vedlikehold. Garantien dekker ikke vanlig slitasje eller slitedeler.

Garantien er ugyldig hvis ikke-originale deler brukes, eller hvis produktet repareres eller endres av personell som ikke er godkjent av Hepro.

Produsent av Krabat-produkter, Hepro AS – heretter referert som "HEPRO" – som har sitt forretningssted i Tømmerveien 10, 8250 ROGNAN, NORGE – gir kjøper av produktet følgende produktgaranti, heretter referert som "GARANTI":

1. Denne GARANTIEN gis under den strenge betingelsen om at kjøper og enhver person som kjøper gir tilgang til produktet overholder følgende SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

- I. Sørg alltid for å ha lest og forstått medfølgende bruksanvisning for produktet før du tar produktet i bruk.
- II. Produktet er bare ment å brukes til det tiltenkte formål i samsvar med HEPRO bruksanvisning for det aktuelle produktet.
- III. Barn eller andre brukere av produktet skal alltid være under tilsyn av voksne.
- IV. Forsikre deg om at hoftebelte(sikkerhetsbelter) er ordentlig festet og fungerer som de skal. Undersøk med jevne mellomrom at hoftebelte er festet tilstrekkelig på produktet.

V. Bruk alltid produktet i samråd med lokal fysioterapeut eller ergoterapeut.

VI. Produktet er ikke et leketøy. Ikke la barn eller andre leke med produktet da det kan forvolde skade på personer og/eller produkt

VII. Når produktet ikke er i bruk, oppbevar det slik at det ikke kan misbrukes eller kan forvolde skade på andre, på produktet og dets funksjoner.

2. Med forbehold om at vilkårene i GARANTIEN overholdes, garanterer HEPRO at produktet for en periode på to (2) år (garantiperioden) fra kjøpstidspunkt av produktet, at produktet skal fungere i samsvar med det tilsiktede formål som angitt i HEPRO bruksanvisning etter kjøpet av produktet.

3. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på produktet i nevnte garantiperiode vil HEPRO tilby assistanse innen rimelig tid. Feilen rettes av enten HEPRO eller tredjepart godkjent av HEPRO enten ved å ta inn produktet til inspeksjon/reparasjon eller videresending av reservedeler for utskifting forutsatt at kjøper av produktet uten unødige forsinkelser etter å ha blitt kjent med mangler, skriftlig har varslet HEPRO eller en representant autorisert av HEPRO om mangel/mangler som oppdages. HEPRO forbeholder seg retten, etter skjønn, å videresende nytt produkt i stedet for å utføre utbedringsarbeid hvis produktet har mangler/feil. Ved ettersending av reservedeler, deler som skal byttes ut eller nytt produkt, anses HEPRO eller autoriserte representanter å ha oppfylt sine forpliktelser når de aktuelle deler eller produkt er gjort tilgjengelig for henting på stedet hvor det opprinnelige produktet ble solgt.

4. I tilfelle en mangel ikke blir utbedret:

I. Kjøper har rett til reduksjon av kjøpesummen i forhold til den reduserte verdien av produktet, forutsatt at reduksjonen av kjøpesum, under ingen omstendigheter, ikke overstiger femten (15%) prosent av kjøpesummen for nevnte produkt, eller

II. Der mangelen er så vesentlig at den fratar kjøperen en vesentlig fordel med formålet med kjøpet, kan kjøperen heve kjøpet på bakgrunn av det mangelfulle produktet. Dersom kjøper har lidd tap, kan kjøper ha rett til refusjon av maksimalt femten (15%) av kjøpesummen for nevnte produkt.

5. Denne GARANTIEN gir ingen garantier utover de garantier gitt i henhold til denne GARANTIEN.

6. For å unngå tvil: Denne GARANTIEN omfatter ikke ethvert ansvar fra HEPRO eller HEPROs autoriserte representanter for indirekte tap eller

følgeskader som er blitt påført av kjøper eller person som gitt tilgang til produktet av kjøper, bevisst eller ubevisst.

7. Denne GARANTIEN gjelder ikke når produktet er supplert med eller har blitt tilført deler som ikke er produsert av HEPRO eller deler produsert eller levert av andre hvor bruken ikke er autorisert skriftlig av HEPRO.

8. HEPRO er kun ansvarlig for feil som oppstår under drifts- eller bruksbetingelser som er forutsatt i bruksanvisning til det aktuelle produktet.

9. HEPRO skal ikke holdes ansvarlig for mangler forårsaket av feil vedlikehold, feiljusteringer eller reparasjoner utført av andre enn HEPRO eller representant autorisert av HEPRO ei eller for endringer i produktet som er utført uten at det foreligger et skriftlig samtykke fra HEPRO.

10. Denne GARANTIEN dekker ikke normal slitasje

11. HEPRO er under ingen omstendigheter ansvarlig for mangler eller skader på deler av produktet i mer enn to (2) år etter levering.

12. Bortsett fra det som er angitt i denne GARANTIEN, skal ikke HEPRO, så vel som HEPROs autoriserte representanter, holdes ansvarlige for mangler på et produkt. Dette gjelder ethvert tap inkluderte produksjonstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap.

11. Revisjoner av denne bruksanvisning

Revisjon	Dato	Forfatter	Notat
1.0	10.10.2016	A.L. Sorensen	Etablert
2.0	03.05.2021	A.Simensen	Lagt til revisjonstabeller, advarsler og tegnforklaringer
2.1	22.08.2023	Maren Ulvestad Haugstuen	Endret forsidebilde. Lagt til standardpunkter 8, 9, 10, 11. Punkt 3 og 5 slått sammen til punkt 4. Punkt om "Justeringer" endret til "Bruk"

Informasjonen i denne bruksanvisningen var korrekt ved publiseringstidspunktet. Informasjonen kan endres av produsenten uten forvarsel, gå derfor inn på våre nettsider for oppdatert bruksanvisning og til enhver tid oppdatert teknisk informasjon om produktet.

HEPRO

Aktiv og trygg
i alle livets faser