

Krabat Jockey

Serviceinstruktioner

Introduktion:

Krabat Jockey är en personlig produkt som måste anpassas och justeras av en terapeut innan användning. Alla anpassningar och justeringar efter detta ska göras i samråd med terapeut (!) Om justeringar ska göras, se produktens bruksanvisning.

Dessa serviceinstruktioner ger nödvändig information för underhåll och inspektion av Krabat Jockey. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

- **Säkerhetsinformation:**
Innan service eller underhåll utförs på rullstolen, observera följande:
 - Använd personlig skyddsutrustning vid behov.
 - Säkerställ att servicearbetet utförs i enlighet med tillverkarens specifikationer.
 - Säkerställ att rullstolen står på en stabil yta innan något arbete utförs.
 - För att förebygga och undvika skador; håll fingrarna borta från alla rörliga delar och från kläder eller kroppens extremiteter.
- **Schemalagt underhåll:**
Obs: Krabat Jockey är underhållsfri, det finns inget krav på regelbundet underhåll av denna produkt.
- **Serviceprocedurer:**
För att säkerställa Krabat Jockeys funktionalitet och tillförlitlighet, bör följande fokusområden uppmärksammas:

Sitsenhet

| Kontrollera komponent | Frekvens | Kontrollpunkt |
|--|-----------------------|--|
| Kontrollera brukarens sittposition | Före varje användning | Kontrollera att alla bälten och selar är nävarande, och at alla justeringar är som föreskrivet |
| Kontrollera sitsens höjjustering | Före varje användning | Kontrollera att sitsen rör sig lätt upp och ner och er korrekt justerad till brukaren |
| Kontrollera att sitsenheten är ordentligt fastsatt | Före varje användning | Kontrollera att sätet sitter stadigt baktill och att kolven för spännaren är i låst läge |

Lyftpelare/ hovudenhet

| Kontrollera komponent | Frekvens | Kontrollpunkt |
|--|-----------------------|--|
| Kontrollera lyftets funktion (manuell) | Före varje användning | Kontrollera at gaskolvens frigöringsknapp fungerar och at sitsen lär flyttas upp och ner |

| Kontrollera komponent | Frekvens | Kontrollpunkt |
|--|-----------------------|---|
| Kontrollera lyftets funktion (elektrisk) | Före varje användning | Kontrollera at knapparna på ställdonet fungerar och at sitsen rör sig upp och ner |
| Kontrollera alla kablar (elektrisk) | Före varje användning | Kontrollera att alla kablar är hela och fria från skador |

Broms

| Kontrollera komponent | Frekvens | Kontrollpunkt |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| Kontrollera bromsens funktion | Före varje användning | Kontrollera att hjulen låses när bromsen aktiveras (alle fyra hjul) |
| Kontrollera bromsens funktion | Före varje användning | Kontrollera att bromshandtaget låses på plats och att hjulen låser |

- Om någon av kontrollpunkterna ovan inte stämmer överens eller om du är osäker på korrekt funktion, kontrollera användarmanualen för detaljer. Om produkten inte fungerar korrekt enl ovan, vänligen kontakta en av Hepro's representanter.
- **Rengöring**
Torka bort damm och smuts från ramen och de anslutna komponenterna med en fuktig trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytor.
- **Felsökning**
Om Krabat Runner inte fungerar och alla ovan nämnda åtgärder har utförts, vänligen kontakta Hepro eller en Hepro-representant i din marknad för ytterligare detaljer.
- **Reservdelar**
Om byte är nödvändigt, använd endast originalreservdelar från tillverkaren. Kontakta Hepro AS eller en Hepro-representant i din marknad för att beställa de komponenter som behövs.
- **Avfallshantering**
Gamla reservdelar ska kasseras enligt tillämpliga regler för avfallshantering och återvinning.
- **Underhållslogg**
Hepro AS serviceavdelning samt varje Hepro-representant kommer att hålla en service logg för varje produkt.
- **Bilagor:**
 - Lista över reservdelar