



Krabat Sheriff S1 / S2

Bruksanvisning



Säkerhet

All service måste utföras av Krabat eller en auktoriserad partner.
Produkter med elektriska komponenter måste skickas till Krabat för teknisk granskning/översyn innan de skickas ut för återanvändning.



CE-märket måste tas bort om produkten har modifierats eller om icke originaldelar används!



Justeringar som inte beskrivs i Krabats bruksanvisningar ska endast utföras av Krabat eller av personal som är godkänd av Krabat.



Krabats produkter är inte leksaker! Felaktig användning kan skada både användaren och/eller produkten.



Skulle en allvarlig incident/skada inträffa i samband med användning av utrustningen ska detta rapporteras till tillverkaren eller produktens distributör i det land där produkten säljs.
Detta rapporteras sedan till behöriga myndigheter i det land där produkten säljs.



Alla Krabats produkter har 2 års garanti. Denna garanti är avsedd att täcka defekter i tillverkning eller material. Garantin kan reduceras eller upphävas om villkor för service eller dagligt underhåll inte följs. Det är kundens ansvar att se till att underhåll utförs.

Garantin täcker inte oavsiktlig skada, inklusive skador orsakade av felaktig användning eller brist på underhåll. Garantin täcker inte normalt slitage eller slitdelar.

Garantin gäller inte om icke originaldelar används, eller om produkten repareras eller modifieras av personal som inte är godkänd av Krabat

Revisionshistorik:			
Revidering:	Datum:	Författare:	Notering:
1.0	2016-10-10	A.L. Sørensen	Skapat
2.0	2021-05-03	A.Simensen	Lade till ändringslogg, varningar och förklaringar
2.1	2021-06-22	A. Simensen	Sida 13 lades till
2.2	2021-11-11	Andreas Simensen	Tillagd text om rapportering av allvarlig incident på s.2

Informationen i denna bruksanvisning var korrekt vid tidpunkten för publiceringen. Informationen kan ändras av tillverkaren utan föregående meddelande. Gå därför till www.krabat.no för uppdaterade bruksanvisningar och uppdaterad teknisk information om produkten.



Sheriff S1 / S2

	Sida
Allmänt	06
Huvudkomponenter	07
Användning	08
Individuella anpassningar	08
Extrautrustning	13
Tekniska data	13
Varningar och definitioner	14
Garanti	17





Allmänt

Krabat Sheriff S1 är avsedd för barn i åldersgruppen 2–7 år, Krabat Sheriff S2 för åldersgruppen 6–12 år. Rullstolen är väldigt lätt och har en cambervinkel på hjulen vilket gör den mycket manövrerbar.

Sittställningen kan anpassas till det enskilda barnet genom att justera sitsens lutning, ryghöjden, fotstödens läge och fotstödens olika vinklar. Sittpositionen är nästan identisk med sittpositionen i Krabat Sheriff. Användningen av rullstolen bör fastställas av barnets sjukgymnast eller arbetsterapeut.

I Krabat Sheriff S1/S2 är placeringen av fötterna utgångspunkten för en bra sittställning. Här får barnet en bred stödyta som skapar en bra balans och som tillsammans med sadelsitsen ger en neutral och naturlig position för bäckenet. Detta ger ryggraden en naturlig kurva och barnet får en tydlig mittlinje som bibehåller balans och ger bra möjligheter för aktivitet. Det förhindrar att barnet kollapsar i överkroppen och hjälper barnet till en aktiv sittställning. Dessutom blir det lättare att kontrollera bröst och huvud när kroppen är i en naturlig position, vilket gör det lättare att svälja, tala och andas.

Sadelpositionen är en dynamisk och bra utgångspunkt för att köra rullstolen. Överkroppen kan röra sig fritt och armarna har stor frihet för att manövrera drivhjulen medan underkroppen hålls på plats i ett anatomiskt gynnsamt och nära perfekt läge för rullstolskörning.

För att säkerställa en optimal sittställning måste tester och anpassningar göras innan barnet använder rullstolen. Använd inte stolen om testning inte har genomförts. Tillåt inte andra barn att använda rullstolen om inte individuell testning har ägt rum.

Barn växer och ändrar ständigt sin sittställning. Därför kan barnet så småningom behöva en annan sittstorlek eller andra justeringar. Kontakta ditt barns sjukgymnast eller arbetsterapeut om du inte tycker att produkten fungerar optimalt eller om du tror att justeringar är nödvändiga.

Rullstolen har utvecklats och testats för en maximal användarvikt på 60 kg.

NOTERA: För synskadade rekommenderas att ladda ner bruksanvisningen för Sheriff S1/S2 på www.krabat.no i PDF-format. Skala denna till önskad storlek.



Huvudkomponenter – Sheriff S1/S2

Fig. 01

Krabat Sheriff har följande huvudkomponenter:

01 Sadelsits med justerbar lutning, sittdyna

02 Justerbar rygg, ryggdyna

03 Justerbara fotplattor

04 Ram

05 Drivhjul

06 Framhjul

07 Parkeringsbroms

Användning

Innan Krabat Sheriff S1/S2 används måste vinklarna på sitsen, rygg och fotplattor ställas in för att ge barnet en optimal sittställning. Justeringarna bör utföras av en sjukgymnast eller arbetsterapeut som har fått utbildning från Krabat AS eller av en representant för Krabat AS.

Alla justeringar kan göras steglöst med den medföljande insexnyckeln under sätet. **Det är viktigt att alla skruvar dras åt tillräckligt efter justering.**

Rullstolen är gjord för användning inomhus och utomhus på hårda och plana ytor. Vid körning i **brant terräng** var noga med att luta dig mot marken, undvik skarpa svängar och plötsliga inbromsningar. **OBS:** Bromsen är en parkeringsbroms. Använd inte parkeringsbromsen för att bromsa i brant terräng.

Använd bromsen när du stiger **in- och ut** från rullstolen. Ta gärna hjälp av en person vid in- och urstigning från rullstolen.

Hur barnet ska använda rullstolen bör diskuteras med en lokal terapeut eller någon som känner barnet väl. Man bör klargöra i vilka situationer man vill använda rullstolen, hur länge den ska användas åt gången och om man bör öka användningen gradvis. Detta bör utvärderas längs vägen i taket med att barnet vänjer sig vid rullstolen.

Vid test och/eller leverans får användaren information om hur man går in och ut ur rullstolen. Innan barnet placeras i rullstolen måste man se till att parkeringsbromsen är aktiverad.

Fotplattor

Fötterna placeras på fotplattorna och remmarna över fötterna justeras och dras åt. Barn som använder fotledsortoser bör använda dessa och eventuellt skor i Krabat Sheriff S1/S2.

Fotplattornas höjd kan justeras genom att justera remmen mellan ramen och fotplattorna. Position fram och tillbaka längs ramen kan göras genom att lossa 4 skruvar som fäster fotplattorna på ramen. (Bild 02a).

Varje fotplatta är monterad med två skruvar. Genom att lossa den främre skruven på fotplattans ovansida kan bredd och vinkel justeras (Fig. 02b). Dra åt skruvarna ordentligt när justeringarna är klara. **Dra åt skruvarna ordentligt när justeringarna är klara.**



Fig. 02a
Fotplattans höjd justeras genom att lossa fyra skruvar



Fig. 02b
Bredden och vinkeln justeras genom att lossa de två skruvarna på fotplattans ovansida.

Sitsvinkel

Barnet placeras på sadelsitsen och höftbältet justeras och fästs. Se till att barnet placeras längst bak på sadelsitsen och att barnet sitter rakt och symmetriskt med underkroppen. Höftbältet måste alltid användas, eftersom det ser till att barnet inte faller ur rullstolen.

Med fyra insexskruvar på sätets undersida kan sätesvinkeln justeras (se fig. 03). Lossa de fyra skruvarna och justera sätesvinkeln.

Dra åt skruvarna ordentligt när justeringarna är klara.



Fig. 03
Justering av sätesvinkel

Höjd på sätet

Med två insexskruvar på undersidan av sätet där 2 st. rör kommer upp från ramen kan sitthöjden justeras. Lossa skruvarna och justera sitthöjden (se fig. 04).

Dra åt skruvarna ordentligt när justeringarna är klara.



Fig. 04
Justering av säteshöjd

Höjd på ryggstöd

Ryggstödet höjd justeras och fixeras med låsspaken som finns på baksidan av ryggplattan (fig. 05). Öppna låsspaken och justera ryggstödet till önskad höjd. Dra åt låsspaken för att låsa ryggstödet i önskad höjd. Efter en tids användning kan det vara nödvändigt att justera låskraften på låsspaken. Detta görs genom att rotera plastskivan under själva spaken. Låsspaken ska vara relativt svår att dra i när du låser fast ryggen.



Fig. 05
Justering av ryggstödet höjd

Justering av tyngdpunkten

Justering av tyngdpunkten görs genom att flytta sätet i förhållande till ramen. Lossa de två skruvarna på sätets undersida med en 4 mm insexnyckel (se fig. 06). Skjut sedan sätet fram och tillbaka för att placera sätet i rätt läge.

Dra åt skruvarna ordentligt när justeringen är klar.

Vi rekommenderar också att en representant från Krabat AS justerar tyngdpunkten tillsammans med en terapeut för att säkerställa optimal och säker användning av rullstolen. Justering av rullstolens tyngdpunkt påverkar också rullstolens lutningsvinklar och bör göras försiktigt.



Fig. 05
Justering av ryggstödet höjd

Användning av parkeringsbroms

Parkeringsbromsen aktiveras genom att föra bromshandtaget nedåt (se fig. 07). Parkeringsbromsen låser båda drivhjulen samtidigt. Parkeringsbromsen tas bort genom att föra handtaget uppåt tills det sitter fast i låsmekanismen (se fig. 08).

Parkeringsbromsen måste alltid vara aktiverad (på) när användaren går in eller ut ur rullstolen. Parkeringsbromsen får inte användas medan rullstolen rullar. Att använda parkeringsbromsen när rullstolen är i rörelse kan skapa farliga situationer.

Efter långvarig användning kan de två vajrarna på parkeringsbromsen behöva justeras.

Kontakta i så fall Hepro AS, avd. Krabat eller en representant för Krabat.



Fig. 07
Broms på



Fig. 08
Broms av

Användning av tippskydd (tillbehör)

Krabat Sheriff S1/S2 är utrustad med 2 tippskydd. Standardläget har en lutningsvinkel på 7 grader innan tippskyddet slår in. Denna lutningsvinkel kan enkelt ändras till 14 grader. Krabat rekommenderar att alla användare behåller tippskyddet monterat.



Fig. 09a
Inre position – inaktiverat



Fig. 09b
Dra uppåt och tippskyddet utåt



Fig. 09c
Yttre aktiv position



Fig. 09d
Dra uppåt och tippskyddet utåt

Breddjustering

Bredden mellan hjulen kan justeras. Genom att lossa skruven enligt figur 10. För att göra justeringen måste skruvarna som håller tippskyddet lossas.



Fig. 10
Justering av avståndet mellan hjulen

Transport

Krabat Sheriff S1/S2 är utrustad med Quick Release-axlar för snabb och enkel demontering av drivhjulen när stolen ska transporteras.

Tryck på knappen mitt på axeln. Håll knappen nedtryckt och dra hjulet rakt ut. Vid montering, se till att knappen åker ut igen och att hjulet sitter ordentligt innan rullstolen används igen. Det är viktigt att drivhjulen sitter som föreskrivet på rullstolen och att du är helt säker på att axlarna är låsta för att undvika farliga situationer. Ryggstödet kan fällas ned mot sätet för att göra produkten så kompakt som möjligt under transport. Lossa de två rattarna på sidan på så sätt som visas i figur 11.

Krabat Sheriff S1/S2 är inte lämplig för flygtransport utan lämplig yttre förpackning (låda, resväska eller liknande). Transport av Krabat Sheriff S1/S2 utan ytterförpackning kan skada produkten vilket kan skapa farliga situationer.

Krabat Sheriff S1/S2 är inte godkänd för användning i bilar.



Fig. 11
Demontering/montering av hjul och nedläggning av ryggstöd

Tillbehör

Krabat Sheriff har ett stort urval av tillbehör som kan monteras eller beställas i efterhand, t.ex. bord, huvudstöd och körhandtag. Det finns också ett urval av olika västar, fotledsmuddar etc. Se www.krabat.no för en uppdaterad lista över tillbehör. Alla tillbehör och all extrautrustning har sina egna bruksanvisningar som medföljer.

Om du behöver extra utrustning, annan utrustning eller ställa in din Krabat Sheriff, kontakta hjälpmedelscentral, din lokala sjukgymnast eller arbetsterapeut eller en representant från Krabat.

Underhåll

Alla delar, metall eller plast, kan rengöras med tvål och vatten. Sätet och stolsryggen kan levereras med olika typer av kuddar och överdrag, antingen en "allt-i-ett"-kudde eller en kudde med separat sätesöverdrag. "Allt-i-ett"-kudden kan rengöras med en trasa och tvålsvatten eller maskintvättas i 40 grader. Det separata sätesöverdraget kan tvättas i maskin vid 40 grader Celsius. Ingen av kuddarna eller sätesöverdraget kan torktumlas.

Krabat Sheriff är en personlig produkt, individuellt anpassad efter medicinska krav och krav för användaren. Regelbundet underhåll av produkten är inte nödvändigt. Tvätta stolens delar vid behov. Följ normala hygienråd och se till att stolen alltid är ren.

Sätes- och ryggdynan av mikrofibertyg fästs på stolen med kardborreband. Råd om borttagning av fläckar finns på www.krabat.no.

Kullager och andra rörliga delar är underhållsfria och behöver inte smörjas.

För att undvika skador bör ingen del av produkten repareras eller underhållas under användning.

NOTERA: Om delar är skadade måste du sluta använda stolen och kontakta auktoriserad personal för service eller råd om korrigerande åtgärder.

Individuella justeringar och anpassningar

Om barnet växer ur produkten, ändrar sitt sittmönster eller stolen behöver justeras av andra anledningar, kontakta en sjukgymnast, arbetsterapeut eller ett hjälpcenter i ditt län. Anpassning av produkten måste göras av kvalificerad personal eller en representant från Krabat AS.

Under inga omständigheter ska du göra modifieringar eller ändringar av stolen.

Tekniska data

Material:

Ram:	Anodiserat aluminium
Kuddar:	Brandhämmande skum
Överdrag:	Brandhämmande tyg av mikr Neopren
Plastdelar:	POM, PA6 och ABS
Övriga metalldelar:	Aluminium och stål



Instruktioner om hur du tvättar kuddar och textilier finns på tvättdlapparna

	S1		S2		
ISO 7176-15	Min	Max	Min	Max	Kommentar
Maximal användarvikt		60 kg		60 kg	
Nominellt däcktryck	6,0 bar	8,0 bar	6,0 bar	8,0 bar	
Drivhjulsdiameter		20"		24"	
Bredd	56 cm	64 cm	61 cm	69 cm	
Längd		66 cm		76 cm	
Höjd	69 cm	78 cm	79 cm	89 cm	
Vikt		8,9 kg		9,1 kg	Standard utan tillbehör
Sitthöjd över golvet	44 cm	47 cm	48 cm	52 cm	
Lutningsvinkel med tippskydd	7 °	14°	7 °	14°	
Diameter drivring		44,5 cm		53,5 cm	
Axelhöjd		25,5 cm		30 cm	
Sätessdjup		28 cm		31 cm	
Sätetsbredd		24 cm		30 cm	
Sitsvinkel	- 15°	+15 °	- 15°	+15 °	Total justeringsvinkel -30°
Ryggbredd		26 cm		32 cm	
Ryggvinkel	- 15°	+15 °	- 15°	+15 °	Fixerat till sits
Svängradie	40 cm		44 cm		

Varningar och definitioner

Allmänna varningar:

Kvävningsrisk:

Vid normal användning, när användaren sitter i rullstol och eventuellt är säkrad, finns det ingen risk för kvävning. För att undvika risken för kvävning ska du inte lämna barnet utan uppsikt när barnet använder Krabat Sheriff.

Klämrisk:

Risken för klämskador är liten vid normal användning så länge justeringsinstruktionerna följs. Hjul och andra rörliga delar kan utgöra en klämrisk för andra personer än användaren när produkten används. Se därför till att stolen inte används utan uppsikt av en vuxen och lämna aldrig barnet i stolen utan uppsikt.

Om skruvar och andra rörliga delar inte är åtdragna kan produkten bli instabil vilket kan leda till klämrisk.

För att förhindra sådana incidenter bör man aldrig låta barnet använda stolen utan uppsikt.

Tipprisk:

Det finns alltid en risk för att produkten tippas över så länge du inte följer de instruktioner/begränsningar som en terapeut som Krabat utbildat anger, den information som medföljer produkten eller den information som finns på Krabat.no. En allmän regel är att varje rörelse utanför produktens "avtryck" mot underlaget kan utgöra en tipprisk. Ju högre användaren befinner sig desto större är risken för att produkten tippas. Detsamma gäller andra monterade komponenter såsom bord, kommunikationsverktyg och säckar/påsar. För att förhindra sådana incidenter bör man också undvika detta och aldrig låta barnet använda stolen utan uppsikt.

Definition av använda delar:

Definitionen av använda delar är delar av produkten som kommer i kontakt med ANVÄNDAREN vid normal användning.

Definition av använda delar är: sätesenhet och stolsrygg inklusive kuddar, fotstöd inklusive fotledsremmar/fotledsmuddar och höftbälte, huvudstöd, bord och körhandtag.

Transport och förvaring

Under transport och/eller förvaring ska Krabat Sheriff förbli funktionell vid normal användning inom sina specifikationer efter transport eller förvaring inom följande temperaturintervall:

- -25°C till +5°C, och
- +5°C till +35°C vid relativ luftfuktighet upp till 90 %, icke-kondenserande;
- > 35°C till 70°C vid vattenångstryck upp till 50 hPa

efter att produkten har tagits ur förpackningen och sedan mellan användningstillfällena.

Notera: Krabat Sheriff ska förvaras inomhus.

Miljöpåverkan under användning

När Krabat Sheriff ska användas måste den användas under följande förhållanden:

- Vid temperaturer mellan +5°C och +40°C;
- Vid en relativ luftfuktighet mellan 15 % och 93 % (ej kondenserande)
- Vid ett atmosfärstryck mellan 700 hPa och 1 060 hPa

Denna produkt är klassificerad för icke-kontinuerlig användning.

Normal driftscykel för användning – 10 % eller 2 minuters drift följt av 18 minuters stillastående.

Användning efter förvaring:

Om Krabat Sheriff förvaras kallt (under 0 grader Celsius), måste du vänta 20 minuter innan produkten används.

Om Krabat Pilot förvaras på en varm plats (över 50 grader Celsius) måste alla ytor svalna till lufttemperatur innan barnet placeras på produkten. Vänta i 20 minuter innan du använder produkten.

Undvik brännskador:







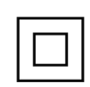





Om Krabat Sheriff lämnas i direkt solljus, ska du flytta stolen från direkt solljus och kontrollera att alla ytor nått en acceptabel temperatur innan du placerar barnet i stolen.

Tips: För att förhindra att ytorna blir för heta kan Krabat Sheriff täckas över för att skydda produktens ytor från direkt solljus.

Recycle components and materials in accordance with local, state, and national regulations.

Förklaringar av symboler

Förklaringar till de olika symbolerna som används på produkten och i denna bruksanvisning:

Symbol	Betydelse	Betydelse	Förklaring
	Ssymbol för användning som medicinsk utrustning.	<i>Tillverkare</i>	Anger tillverkaren av medicinsk utrustning
	Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda	<i>Se bruksanvisningen</i>	Anger behovet av att användaren läser bruksanvisningen
	Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda	<i>Följ bruksanvisningen</i>	Se bruksanvisningen
	Allmänt varningsskylt	<i>Varning: läs alla varningar och säkerhetsregler i bruksanvisningen</i>	När en användare befinner sig i stolen och stolen ska flyttas, t.ex. från ett rum till ett annat, rekommenderas det INTE att det sker i högsta position. För att förhindra oavsiktlig tippning, flytta aldrig stolen när sätet är i högsta läge.
	Medicinsk elektrisk utrustning	<i>Type BF applied part</i>	Identifiering av type BF applied part enligt IEC 60601-1.
IPN ₁ N ₂	Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda	<i>Grad av vatten- och damminträngning</i>	Manufacturer-determined degree of particle and water ingress protection.
	Symbol för användning vid märkning av elektriska apparater	<i>Endast för inomhusbruk</i>	To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.
	Symboler för användning vid märkning av elektriska apparater.	<i>Riskklass 2</i>	För att identifiera elektrisk utrustning avsedd främst för inomhusbruk
	Kraven för ackreditering och marknadsövervakning relaterad till marknadsföring av produkter; Direktivet om medicinsk utrustning	<i>CE-märkning</i>	Anger europeisk teknisk överensstämmelse.
	Symbol för användning vid märkning av elektriska apparater.	<i>Släng inte avfall</i>	Huvudpoängen är att du inte ska slänga den elektriska utrustningen i de vanliga soptunnorna (den bör tas till ett lokalt återvinningscenter)
	Symbol från det certifierade organet som utförde tester	<i>Certifieringsmärkning</i>	Certifieringsmärkning betyder att denna produkt är certifierad för att uppfylla kraven i amerikanska och kanadensiska elsäkerhetsstandarder
	Säkerhetsskyltar som förbjuder sittande på en yta.	<i>Inget sittande på ytan</i>	För att identifiera ytor/delar som är olämpliga att sitta på.
	Säkerhetsskyltar som förbjuder att man kliver på en yta.	<i>Trampa inte på ytan</i>	För att identifiera ytor/delar som är olämpliga att gå på.

Garanti

Tillverkare av KRABAT-produkter, Hepro AS avd. KRABAT, nedan kallad KRABAT, som har sitt säte på Ravensborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norge – ger köparen av en KRABAT-produkt följande produktgaranti, nedan kallad "GARANTI":

1. Denna GARANTI ges under det strikta villkoret att köparen och varje person som köparen ger tillgång till KRABAT-produkten uppfyller följande SÄKERHETSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
 - I. Läs och se till att du alltid förstår de medföljande bruksanvisningarna för produkten innan du använder produkten.
 - II. KRABAT-produkten är endast avsedd att användas för det avsedda ändamålet i enlighet med KRABATS bruksanvisning för den relevanta KRABAT-produkten.
 - III. Barn eller andra användare av KRABAT-produkten måste alltid hållas under uppsikt av vuxna.
 - IV. Se till att höftbältet (säkerhetsbältet) sitter ordentligt fast och fungerar som det ska. Kontrollera regelbundet att höftbältet är ordentligt fastsatt på KRABAT-produkten.
 - V. Använd alltid KRABAT-produkter i samråd med en lokal sjukgymnast eller arbetsterapeut.
 - VI. KRABAT-produkten är ingen leksak. Låt inte barn eller andra leka med KRABAT-produkten eftersom det kan skada personer och/eller produkten
 - VII. När KRABAT-produkten inte används, ska den förvaras så att den inte missbrukas, skadar andra, KRABAT-produkten eller dess funktioner.

2. Med förbehåll för villkoren i GARANTIN garanterar KRABAT att KRABAT-produkten under ett (1) år (garantiperioden) från inköp, att den ska fungera i enlighet med det avsedda syftet anges i KRABAT:s bruksanvisning efter köp av KRABAT-produkten.

3. Om någon skada eller defekt uppstår på produkten under nämnd garantiperiod kommer KRABAT att erbjuda hjälp inom rimlig tid. Felet korrigeras av antingen KRABAT eller en tredje part som godkänts av KRABAT, antingen genom att ta in produkten för inspektion/reparation eller leverans av reservdelar för utbyte förutsatt att köparen av KRABAT-produkten utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om defekten, skriftligen har meddelat KRABAT eller en representant som är auktoriserad av KRABAT om defekter som upptäcks. KRABAT förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande erbjuda en ny produkt istället för att utföra reparationsarbete om produkten har fel/defekter. Vid vidarebefordran av reservdelar, delar som behöver bytas ut eller en ny produkt. Vid vidarebefordran av reservdelar, delar som ska bytas ut eller en ny produkt, anses KRABAT eller auktoriserade ombud ha uppfyllt sina skyldigheter när relevanta delar eller produkten görs tillgänglig för upphämtning på den plats där den ursprungliga KRABAT-produkten såldes.

4. Om en defekt inte åtgärdas:
 - I. Köparen har rätt till en sänkning av inköpspriset i förhållande till det reducerade värdet på KRABAT-produkten, förutsatt att sänkningen av inköpspriset under inga

omständigheter inte overstiger femton (15 %) procent av köpeskillingen för den aktuella KRABAT-produkten eller

- II. Om defekten är så betydande att köparen inte får den väsentliga fördel som var syftet med köpet, kan köparen häva köpet på grundval av den defekta KRABAT-produkten. Om köparen har lidit förlust, kan köparen ha rätt till återbetalning på högst femton (15 %) av inköpspriset för den aktuella KRABAT-produkten.
5. Denna GARANTI ger inga garantier utöver de garantier som anges i denna GARANTI.
6. För att undvika tvivel: Denna GARANTI täcker inget ansvar från KRABAT eller KRABAT:s auktoriserade representanter för indirekta förluster eller följskador som uppstått för köparen eller den person som köparen medvetet eller omedvetet gav tillgång till produkten.
7. Denna GARANTI gäller inte när KRABAT-produkten kompletteras med eller har levererats med delar som inte tillverkats av KRABAT eller delar som tillverkas eller levereras av andra där användningen inte är skriftligt godkänd av KRABAT.
8. KRABAT är endast ansvarig för fel som uppstår vid användning enligt bruksanvisningen för den relevanta KRABAT-produkten.
9. KRABAT ansvarar inte för fel orsakade av felaktigt underhåll, felaktiga justeringar eller reparationer utförda av någon annan än KRABAT eller en representant som godkänts av KRABAT eller vid ändringar av KRABAT-produkten som har gjorts utan skriftligt tillstånd från KRABAT.
10. Denna GARANTI täcker inte normalt slitage
11. KRABAT är under inga omständigheter ansvarigt för defekter eller skador på delar av KRABAT-produkten i mer än två (2) år efter leverans.
12. Med undantag av vad som anges i denna GARANTI, ska KRABAT och KRABATS auktoriserade representanter, inte hållas ansvariga för defekter på någon KRABAT-produkt. Detta gäller för förluster – inklusive produktionsförluster, förlust av vinst eller andra indirekta förluster.