




Bruksanvisning

Xplore

För Xplore Small, Xplore Medium, Xplore Large

Bruksanvisning för Xplore

Innhold

1. Innledning	4
2. Vad är Xplore	4
2.1 Avsedd användning (Intended use)	4
2.2 Indikationer	4
2.3 Kontraindikationer	4
2.4 Försiktighetsåtgärder	5
2.5 Utbildning och assistenter	5
3. Säkerhetskontroll	6
4.  Varningar	7
5. Teknisk beskrivning	9
5.1 Underrede:	10
5.2 Stag, säte, höftstöd, bröststöd och huvudstöd:	12
5.3 Korrigeringssystem för ben och fot	13
6. Anpassning till användaren	14
6.1 Kontroll av mått på Xplore före leverans:	14
6.2 Prova ut Xplore till en användare:	15
7. Hur justeras Xplore	18
7.1 Dämpare	18
7.2 Justera höjden på staget	19
7.3 Justera höjden på bröststödet, höftbygeln och sätet	21
7.4 Justera bredden på bröststagen och höftbygeln	22
8. Använda Xplore	23
8.1 Användningstid	23
8.2 Utbildning	23
8.3 Sko	23
8.4 Förberedelse innan användning	23
8.5 Hur kommer användaren i Xplore	23
8.6 Säkra användaren i Xplore	23
8.7 Hur användaren kommer ur Xplore	24
9. Utförande av individuella justeringar och efterjusteringar	26
9.1 Individuell justering / utprovning	26
9.2 Justering uppföljning	26
10. Transport	27

11. Teknisk information	29
11.1. Märkning	29
11.2. Specifikationer och dimensioner Xplore	30
12. Ekstrautrustning	33
12.1. Huvudstöd	33
12.2. Sidohandtag	33
12.3. Ledsagarhandtag	34
12.4. Korrigeringssystem för lår och fötter	35
12.5. Bröstpolstring	37
12.6. Riktningsspärr för hjul	37
12.7. Envägslager bakhjul	37
12.8. Stödhandtag	38
13. Tester och godkännningar för Xplore	39
14. Avfallshantering	39
15. Rengöring och underhåll	39
a. Rengöring	39
b. Justering för användartillväxt och funktionsändring	40
c. Inspektion och underhåll	40
16. Återanvändning	41
17. Garanti	42
18. Försäkran om överensstämmelse	43
Bilaga 1 – Utbildning av användare och/eller assistent	45
Bilaga 2 – Monteringsanvisning	47

Friskrivningsklausul: Det kan finnas mindre skillnader mellan bilder i bruksanvisningen och den faktiska produkten.

1. Innledning

Grattis till ditt val av Xplore. Alla människor har rätt till rörelse. Made for Movement har som mål att ge möjlighet till rörelse för personer med begränsad eller liten möjlighet att röra sig själva. Xplore ger användare med begränsad möjlighet till att stå eller gå, möjlighet till dynamisk aktivitet. Den här bruksanvisningen ger en introduktion i hur man använder Xplore.

2. Vad är Xplore

Xplore är ett dynamiskt stå- och gånghjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet. Den gör det möjligt för personen att gå och kan användas i alla vardagssituationer där personen vill delta i upprätt gångställning.

2.1 Avsedd användning (Intended use)

Xplore är ett dynamiskt stå- och gånghjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet, som är avsett för barn, unga och vuxna med väsentligt nedsatt eller ingen förmåga att stå eller gå självständigt.

Xplore passar personer mellan 70-180 cm och som väger mindre än 80 kg.

Xplore är ett personligt hjälpmedel som anpassas till varje enskild användare av en Made for Movement-representant.

Xplore är ett hjälpmedel för individuellt bruk i hemmet, skolan eller dagis under överinseende av en ansvarig person som har fått utbildning i användningen av produkten, till exempel en förälder eller assistent.

2.2 Indikationer

Användaren av Xplore har lindriga till måttliga skador på det neuromuskulära systemet och rörelserelaterade funktioner i de övre och nedre extremiteterna (muskelstyrka, muskeltonus, uthållighet, koordination, ofrivilliga rörelser, rörelsemönster) med nedsatt aktivitet till följd av sjukdom eller skada på hjärnan (t.ex. cerebrala pares, syndrom, trauma), ryggmärgsskada (t.ex. paraplegiska syndrom på grund av spinaltumörer eller trauma) eller neuromuskulära sjukdomar (t.ex. muskeldystrofier).

2.3 Kontraindikationer

- Frakturer i de nedre extremiteterna och/eller överkroppen (ben, bäcken, ryggrad)
- Öppna sår i huden på de delar av kroppen som kommer i direkt kontakt med produkten

2.4 Försiktighetsåtgärder

Inga studier har rapporterat negativa effekter eller biverkningar från användningen av Xplore.

Riskanalysen visar att användare med ett eller flera av följande tillstånd bör konsultera en läkare eller terapeut innan de använder produkten för att bedöma om fördelarna med användningen uppväger risken för skada eller andra möjliga biverkningar:

- Större missbildningar (ryggrad och nedre extremiteter)
- Svåra eller fasta kontraktioner i de nedre extremiteterna (höft- och knäflexionskontraktioner >40°, pes equinus >25°)
- Osteoporos med tidigare eller misstänkta spontana frakturer i de nedre extremiteterna
- Ledstabilitet i de nedre extremiteterna (höfter, knän och fotleder)
- Cirkulationsrubbingar
- Andningsbesvär
- Hjärtsjukdomar
- Epilepsi, med okontrollerbara grand mal-anfall
- Svår spasticitet som hindrar positioneringen och rörelsen i produkten
- Smärta vid viktbelastning eller vid rörelse i de nedre extremiteterna

2.5 Utbildning och assistenter

Innan du använder Xploren ska ansvarig person ha fått utbildning (enligt bilaga 1) av en Made for Movement-representant, så att han eller hon kan övervaka användningen och ge användaren den hjälp han/hon behöver. Representanten är vanligtvis en anställd hos Made for Movement, en återförsäljare eller en läkare/terapeut som har genomgått utbildning och som är officiellt godkänd att arbeta med produkten.

Utbildningen består av en demonstration av alla viktiga funktioner, förflyttning, infästning, säkerhet, användning och felsökning enligt beskrivning i bilaga 1. Dessutom ska bruksanvisningen läsas, förstås, användas och behållas för framtida referens.



Viktigt: Inställningarna på produkten får inte ändras på något annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. Vidare kan produkten endast justeras av en Made for Movement-representant, eller personer som har fått utbildning i hur man anpassar produkten.

3. Säkerhetskontroll

Vad är en säkerhetskontroll?	Säkerhetskontroll är en kontroll som görs för att upptäcka slitage på viktiga delar.
Typer av säkerhetskontroll:	Dagligen: De viktigaste delarna kontrolleras dagligen före användning. Månadsvis: Övriga slitdelar kontrolleras för slitage en gång i månaden.
Varför ska man utföra:	För att upptäcka slitage och byta ut slitna delar innan en eventuell del går sönder.
Vem ska utföra:	Utbildade assistenter. Endast utbildade assistenter får kontrollera + använda produkten.
Vad du ska utföra:	Teststegen beskrivs nedan.
Vad ska man göra om fel upptäcks:	Kontakta din Made for Movement-representant för att komma överens om åtgärder/repARATIONER.

Daglig säkerhetskontroll:

Dagligen, före användning, ska följande kontrolleras av assistenten:

1. **Bälten** – Kontrollera att alla bälten är intakta och utan synliga skador och att allt är intakt.
2. **Spännan** - Kontrollera att spännena är intakta och låser väl.

Månadsvis säkerhetskontroll:

En gång i månaden ska följande kontrolleras av assistenten:

1. **Bälten** – Kontrollera att alla bälten är intakta och utan synliga skador och att allt är intakt.
2. **Spännan** - Kontrollera att spännena är intakta och låser väl.
3. **Bröst- och höftstöd** – Ta tag om båda bröststöden och försök sedan att trycka, dra och vrida stöden i alla riktningar. Upprepa för höftstöden. Kontrollera att alla delar sitter ordentligt.
4. **Chassi** – Slå på bromsen, lyft upp produktens front genom att hålla fast vid och höja de 2 framhjulen. Försök att trycka, dra och rotera framaxeln i alla riktningar medan du håller i hjulen. Kontrollera att alla delar sitter tätt.
5. **Fotavskiljare** - Kontrollera att fotavskiljaren är intakt och ordentligt fastsatt.
6. **Hjul** – Kontrollera att bakhjulen inte kan röra sig i sidled på axeln mer än 3 mm.



Kontakta din Made for Movement-representant om fel upptäcks för att komma överens om åtgärder/repARATIONER. Använd inte produkten innan detta är lost.



För fler tips om hur du utför säkerhetskontrollerna, skanna QR-koden och granska instruktionerna för säkerhetskontroll.

4. Varningar

1. Xplore får bara användas när brukaren är under uppsikt av en vuxen, ansvarig person.
2. Xplore är ett personligt hjälpmedel och får inte användas av personer som produkten inte är speciellt anpassad för.
3. Xplore får inte justeras av personer som inte är kvalificerade för uppgiften.
4. Xplore får bara användas med skor som är kompatibla med skofästena som hör till Xplores skensystem.
5. Xplore är godkänd och certifierad för inomhus och utomhus bruk*, och kan användas utomhus i torr miljö. Se till att ytan är jämn och plan och utan hinder. All annan användning av produkten sker på egen risk.
6. Xplore får enbart förvaras och användas i torra miljöer och ej i våtutrymmen såsom duschar, tvättrum, fuktiga miljöer etc.
7. Xplore måste förvaras så att barn och obehöriga personer inte kan använda den som leksak eller ändra inställningarna.
8. Xplore skall förvaras torrt.
9. Under transport måste Xplore vara säkrad ordentligt för att undvika transportskador eller skador på inredning eller på personer i bilen.
10. Xplore ska endast lyftas i ramen, inte i några andra delar.
11. Xplore ska justeras efter behov för att säkerställa att Xploren passar användaren vad gäller användartillväxt och användarfunktionalitet. Justeringarna måste göras av en Made for Movement-representant eller personer som har utbildats för att göra justeringarna.
12. Bordet ger ingen extra säkerhet - håll alltid bröstremmen säkert när användaren är i Xplore.
13. Bälten och remmar kan orsaka kvävning eller andra skador. Var noga med att hålla produkten under konstant uppsikt när den används och förvara den på ett sätt som förhindrar obehöriga från att komma åt produkten.
14. Det finns klämrisk för fingrar vid skenans leder under hantering och användning. Var försiktig och observera var brukaren placerar sina händer och var du som assistent håller på Xplorens skena.
15. Använd aldrig produkten, med eller utan användare, om den omgivande temperaturen överstiger den maximala temperaturen på 40 °C. Kontrollera yttemperaturen på Xplore före användning. Temperaturen på Xplore kan påverkas av radiatorer och direkt solljus etc.
16. Se till att det alltid finns ett klädesplagg mellan brukarens hud och det ställe på kroppen där produkten kommer i kontakt med brukaren. Detta är viktigt för att minska risken för allergiska reaktioner och för att förhindra att skavsår uppstår under bruk. Alla material som används i Xplore har dock testats och godkänts som icke-allergiframkallande.
17. Xplore måste justeras, användas och ställas in enligt beskrivningen i denna användarmanual.

18. Dra inte åt guideremmarna på benen för hårt om detta används. Detta kan leda till skador på användarens knän och ben.
19. Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten. Modifieringar kan leda till farliga situationer och att produkten går sönder.
20. Använd ej andra tillbehör till produkten än dem som beskrivs i denna bruksanvisning. Det leder till bristande överensstämmelse med certifieringen för Xplore.
21. Om avvikelser upptäcks under den dagliga säkerhetskontrollen (kapitel 3), måste Xplore repareras före användning.
22. Bröst- och höftbälten måste alltid vara säkrade när användaren går i Xplore. Bröst- +höftbältena kan fästas lösare när man går i Xplore, men kan inte tas bort då detta är för säkerhets skull.
23. Använd inte produkten i närheten av öppna lågor eftersom bälten och stoppningen inte är flammskyddade.
24. Tryck inte på Xplores säte, pelare eller nackstöd med användaren i produkten. Använd handtaget.
25. Använd alltid Xplore i ett väl upplyst rum så att alla märken lätt kan ses.
26. Användning av denna utrustning tillsammans med eller staplad med annan utrustning bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är nödvändig bör denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att bekräfta normal drift.
27. Användning av syntetiska kläder kan orsaka att användaren får ofarlig statisk chock i produkten.
28. Kontraindikationer ska alltid klargöras före första användningen.
29. Endast personer som har fått utbildning i att använda Xplore ska använda produkten med användaren. Se bilaga 1 för detaljer om innehållet i handledningen.
30. Under användning kan justeringsskruvar lossna något över tiden på grund av rörliga delar och vridning av produkten. Dra åt eventuella lossade skruvar innan du använder den.
31. Utför alltid den dagliga säkerhetskontroll före varje användning för att säkerställa säker användning.

Symboler som används i bruksanvisningen:



Denna symbol indikerar att texten som följer bör läsas mycket noggrant.




Denna symbol indikerar att följande text kan ge dig bra tips.



Denna symbol indikerar klämrisk i produkten.

5. Teknisk beskrivning

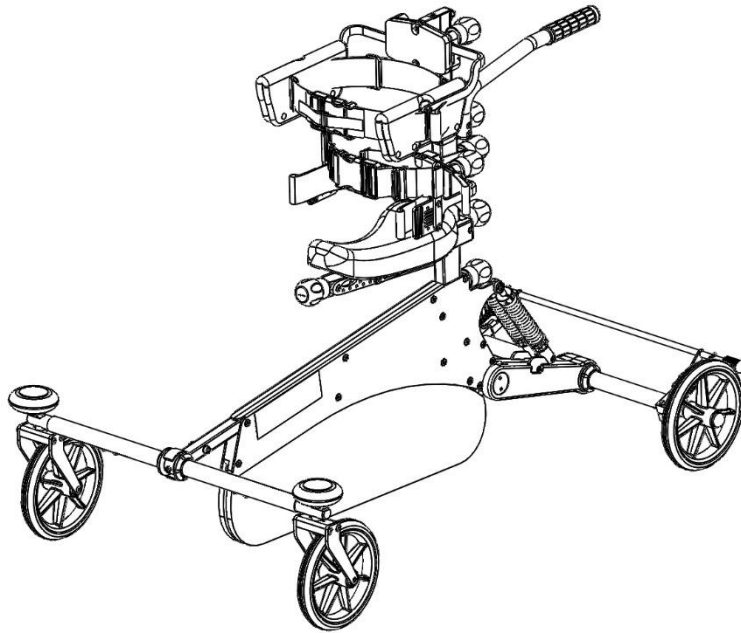

Figur 1: Xplore

Xplore finns i följande storlekar:

Xplore Small	Rekommenderad brukarlängd 70-120 cm
Xplore Medium	Rekommenderad brukarlängd 110-150 cm
Xplore Large	Rekommenderad brukarlängd 140-180 cm


Xplore är ett individuellt anpassat hjälpmedel. Före leverans av produkten, mäts längd och bredd på användaren.

Dessa mått skickas till Made For Movement som kan grovinställa produkten före leverans. En Made For Movement-representant eller annan kvalificerad person kommer att göra de sista justeringarna för användaren och se till att han / hon får en optimalt anpassad produkt.

Serienummer:

Hver Xplore har ett eget, unikt serienummer. Numret är placerat under ramen.

5.1 Underrede:

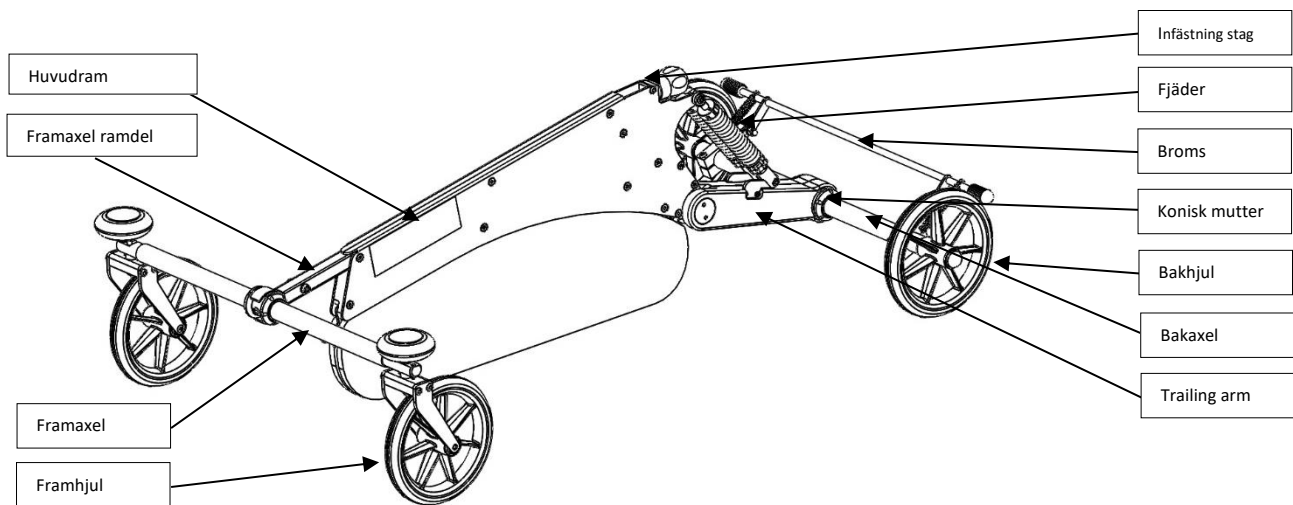

Figur 2: Xplore underrede

Chassit har H-form. Framaxeln och bakaxeln är anslutna till huvudramen. När en användare står eller går i Xplore har han / hon ett ben på varje sida av huvudramen, mellan framaxeln och bakaxeln. Huvudramen mellan användarens ben förhindrar användaren från att korsna benen när man använder Xplore.

Understället har fyra hjul med en diameter på 185 mm (Small har 100 mm hjul för att möjliggöra användning för de minsta användarna). Bakhjulen är fixerade och kan inte svänga. Bakhjulen har en broms som kan aktiveras. Framhjulen kan rotera fritt 360°. Bakhjulen är monterade på bakaxeln som har en fast bredd. Framhjulen är anslutna till den främre axeln som har en fast bredd.

Framaxeln är utrustad med horisontella hjul. Dessa fungerar som väggavvisande om användaren kolliderar i möbler, väggar eller liknande.

Om produkten ska transporteras kan bakaxeln tas bort från huvudramen. Lossa de avsmalnande muttrarna och ta bort axlarna från huvudramen. Ett specialverktyg för de avsmalnande muttrarna kommer med produkten. Se bild på nästa sida.



Figur 3: Xplore verktyg för bakaxel

Läs kapitel 10. I detta kapitel förklaras hur du demonterar och monterar Xplore för transport.


Bakaxeln för Xplore kommer i en bredd. Bakaxeln är ansluten till en bakarm som är fjädrad av en eller två spjäll. Spjället kan levereras med två olika hårdheter på fjädrarna.

Framaxeln är ansluten till en framaxelramdel monterad på huvudramen.

Huvudramen är anslutningspunkten till alla andra delar och kommer att ta upp belastning som genereras av användaren

Staget med säte, höft, bröst och huvudstöd placeras vertikalt i huvudramen. Staget kan justeras i höjd.

5.2 Stag, säte, höftstöd, bröststöd och huvudstöd:

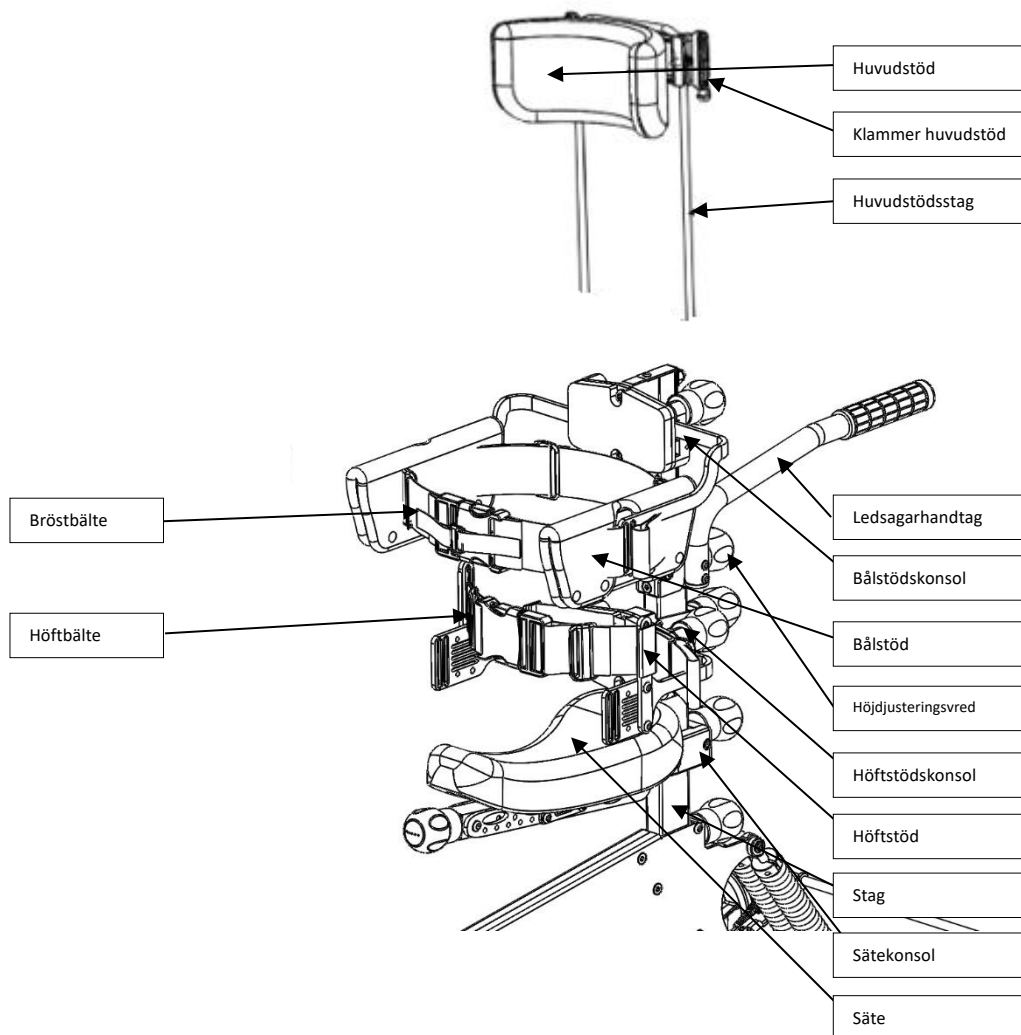

Figur 4: Xplore Stag med huvudstöd och ledsagarhandtag monterat

Staget är fäst vid chassiets högsta punkt. Staget går ner i chassit och hålls på plats av en klämma med fästskruv framför spjällen i chassit. Stagets nedre höjd justeras här.

Sitsen är fäst på ett sätesfäste som i sin tur är fäst vid staget. Sitsen är avtagbar från konsolen. Sitsen kan justeras i höjd.

Höftstödet är fäst på en höftstödfäste. Höftstödet kan justeras i höjd och bredd. Höftstödet har två monterade bälten och detta positionerar och säkrar användarens höft i produkten. Det undre bältet går bakåt och det övre bältet går framåt. Detta för att förbättra användarens höft rörelse under rörelse.

Den övre justeringen av staget utförs av höjdjusteringsfästet på staget. På detta fäste kan ledsagarhandtag också utrustas med en separat extrafäste. Ledsagarhandtagets höjd justeras genom att justera stagets nedre höjd.

Bröststödet är fäst vid staget med ett bröststödfäste. Bröststödet kan justeras i bredd. Ett bröstbälte är monterat på bröststödet, vilket säkerställer användarens överkropp i produkten. Bröststödfästet har en fäste till huvudstödfästet som är säkrat med två små vred.

Nackstödshöjden kan justeras genom att antingen justera höjden på nackstödfästet i bröststödfästet, eller genom att justera nackstödfästet vertikalt genom att lossa skruvarna som fäster det på nackstödfästet. Nackstödfästet har en universell design som gör att alla specialanpassade bälten eller andra nackstöd kan ha möjliga monteringspunkter i detta fäste.


5.3 Korrigeringsystem för ben och fot

För användare som behöver korrigerings av benen under stående och gående kan ett korrigeringsystem monteras på Xplore. Korrigeringsystemet fästs på användarens lår och / eller fötter med manschetter som är anslutna till styrningar för detta på framaxeln och till ett u-rör monterat på staget.

Mer information om hur du använder detta finns i kapitel 12.4

6. Anpassning till användaren

När du beställer en Xplore för en ny användare bör mått tas på användaren så att rätt produktstorlek väljs för användaren innan leverans. Det är normalt att en fysio- / arbetsterapeut tar dessa mått. Måttschema Made for Movement kan användas för ändamålet.

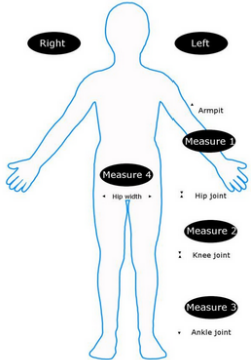Made for Movement salesman																					
Name of user	Physio-therapist	Physio-therapist		Date measured																	
Address	Address	Address		Height																	
Postal code/city	Phone/Mobil	Phone/Mobil		Weight																	
Phone/Mobil	Email	Email																			
Email	Address																				
Shoesize	Phone/Mobil																				
Superior	Email																				
When the form is completed, (pls also remember the field below), you can either fax it or e-mail it to us. Fax: 36505121		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Right</th> <th>Left</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Measure 1</td> <td>cm</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Measure 2</td> <td>cm</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Measure 3</td> <td>cm</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Measure 4</td> <td>cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Right		Left	Measure 1	cm	cm	Measure 2	cm	cm	Measure 3	cm	cm	Measure 4	cm			
	Right	Left																			
Measure 1	cm	cm																			
Measure 2	cm	cm																			
Measure 3	cm	cm																			
Measure 4	cm																				
Additional information of the user When you are measuring the hip-width, it is important that you measure the width not the circumference In case of difference in length of legs please describe				Made for Movement Redmyrta 2, 3740 Siven Ögren 393 393 989 mva info.no@madeformovement.com madeformovement.com Tel: 36 50 51 20 Fax: 36 50 51 21																	

Figur 5: Xplore Användning av måttschema

6.1 Kontroll av mått på Xplore före leverans:

Chassit väljs utifrån användarens höjd och vikt. Höft- och bröststödbredder bedöms mot standardinställningsintervall för att se om användaren kan använda standardkomponenterna. Användarens vikt och gångmönster bedöms mot spjällets standardfjäder, eller om andra fjäderinställningar ska väljas. Xplore kontrolleras för funktionalitet och kvalitet innan den levereras för slutanpassning.

6.2 Prova ut Xplore till en användare:

Anpassningen av Xplore kommer att göras av en representant från Made For Movement eller en annan kvalificerad person. Anpassningen kommer att göras i skolan, hemma eller på den plats där köparen av produkten ser det som mest lämpligt.

- **Grovinställning:**

- Understället placeras på ett plant underlag.
- Höftbygelns höjd placeras vid användarens trochanter. Tips: Mät från fotsula till användarens trochanter medan användaren ligger ned. Se bild under var trochanter är på kroppen.
- Höftbygelns bredd placeras 1-2cm bredare än användarens höftbredd på varje sida.
- Sätets höjd placeras så högt att säteskonsolen kommer i kontakt med höftbygelkonsolen på staget.
- Bröststödetets högsta punkt placeras i underkant av armhålan .
- Bröststödetets bredd placeras 1-2cm bredare än användarens bröstbredd på varje sida.
- Se till att de grovt justerade stöden och bälten sitter ordentligt fast. Flytta användaren till sätet och säkra först användarens höft och bröst. Kom ihåg att alltid säkra användaren i sätet medans bältena fästs så att användaren inte faller ur produkten. Nu är användaren säkrad i produkten och finjustering kan utföras.

- **Fininställning.**


- Sätet:
 - Sätet kan nu sänkas för att hitta önskad belastning och markkontakt för användaren. Kom ihåg att hålla både det främre handtaget på sätet och den bakre monteringsratten när du justerar höjden och har ett uppåt grepp under justeringen, så använd inte den nedåt. Användaren säkras också i denna fas genom att ha stöd under armarna.
- Höften:
 - Höftbygelns höjd kan justeras så att främre höftbältet är placerat över höftböjaren och inte hindrar användarens flexion (böjning) av höften. Bakre höftbältet skall ligga ca mitt på användarens rumpa.
 - Höftbygelbredden kan justeras olika på användare för att ge mer rörelsefrihet.
 - Höftbältets längder fram och bak kan släppas upp eller dras åt, så att användaren kan positioneras framåt eller bakåt i produkten i höftområdet.
- Bröst/bål:
 - Bröststödetets höjd kan nu sänkas ned till önskad överkropps nivå. Ju högre upp bröststödet är ju mer stöd och support får användaren i produkten, och ju lägre bröststödet är ju mer rörelsefrihet får användaren i produkten. Det

är viktigt att det inte tillåts mer rörelsefrihet i överkroppen än användaren kan hantera säkert.

- Bröststödet bredd kan justeras utåt från användaren för att ge mer rörelsefrihet.
 - Bröststödet skall ALLTID användas, då det också är en säkerhetsfunktion som hindrar användaren att ramla ut ur produkten. Om en användare behöver lite överkroppsstöd, bör bröststödet ALLTID användas, men genom att sänka och bredda kan det justeras till en nivå där det väldigt lite stör användarens rörelsefrihet, samtidigt som säkerheten säkerställs.
 - Längden på fram- och baksidan av bälten kan lossas eller dras åt så att användaren kan positioneras framåt eller bakåt i produkten i bröstområdet.
- Bröst-höftinteraktion: Genom att justera bröstet och höftbältenas längd kan användaren placeras i produkten framåt och bakåt i både bröstet och höftområdet. På detta sätt kan en användare räta eller luta lätt i produkten.
 - Extrautrustning som kan korrigera användaren i produkten:
 - När huvudstöd används kan detta justeras i höjd till önskad nivå. Se kap. 12.1 Huvudstöd för detaljer.
 - När du använder ett lår- och fotkorrigeringssystem, se kapitel 0 för information om hur du ställer in detta.
 - Fininställning resultat:
 - Rätt användarinställning framför produkten: Användare vinkelrätt mot marken så långt det är praktiskt möjligt
 - Rätt användarinställning i produkten sett från sidan: Användare vinkelrätt mot marken, eventuellt något framåtvinklat läge (1-3 grader)
 - **Utprovning:** Användaren står nu i Xplore. Hårdheten på fjädern till dämparen kan nu justeras så att användaren kan få mesta möjliga dynamiska rörelse. Användaren står nu med belastning i skorna, men trycket till golvet kan oavsett av belastning justeras med höjd på stag och/eller sätet.



Viktigt: Xplore får endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.

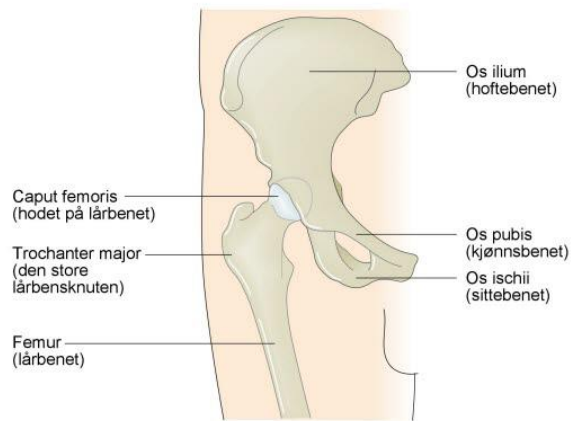


Figur 6: Illustration på hur Trochanter hittas på användarens lårben.


7. Hur justeras Xplore

7.1 Dämpare

- **Varianter:** Xplore levereras med en dämpare på Small och två dämpare på Medium och Large
- **Hårdheten på dämparen:** Den korrekta nivån på dämparen ställs in av en Made for Movement-representant vid den första inställningen. Om dämparens hårdhet behöver ändras senare kan den justeras enligt följande: Lossa låsmuttern för hand (3) två tre varv. Om du vill ha en hårdare dämpare, vrid justeringsmuttern medurs. Medurs ger en mjukare dämpare. Utför justeringen lika på den andra dämparen. När du har justerat dämparen, dra åt låsmuttern (3) mot justermuttern.
- **Specialinställning:** Vid speciella behov kan fjädrar bytas ut utöver standard inställning. MFM har 2 olika fjädrar tillgängliga för specialinställning. Detta kan vara aktuellt om en användare maximerar fjädringen genom användarens tyngd och/eller rörelsemönster så att nedersta delen av ramen kommer i kontakt med golvet. Då kan man först försöka att dra åt fjädern/fjädrarna , och om detta inte fungerar kan man byta till en starkare fjäder.

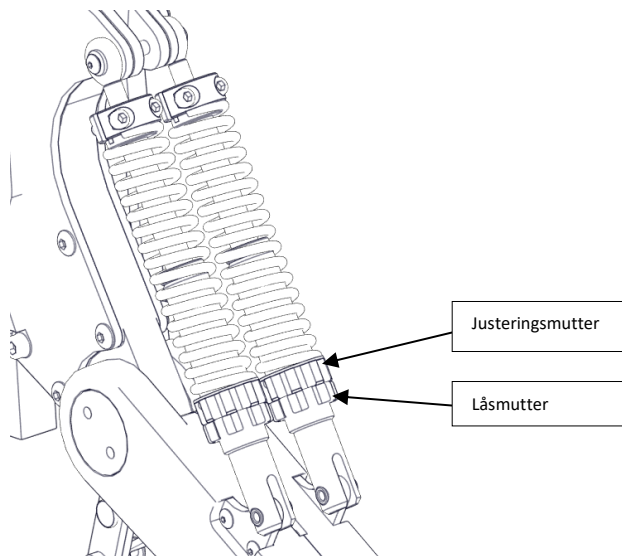


Figur 7: Xplore Dubbel dämpare

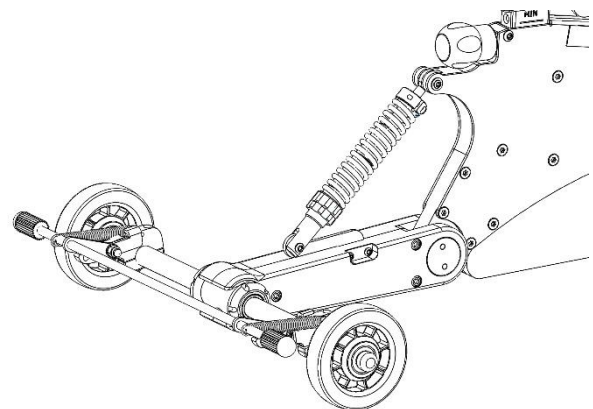

Figur 8: Xplore Enkel dämpare


7.2 Justera höjden på staget

Xplore Finns i 3 storlekar, för att veta vilken storlek som passar till användaren se kap.5. För att anpassa produkten till användaren väljer man den modellen som passar användarens längd. Anpassning till användaren görs genom att justera stag-, säte-, höftstöd- och bålstödshöjden.

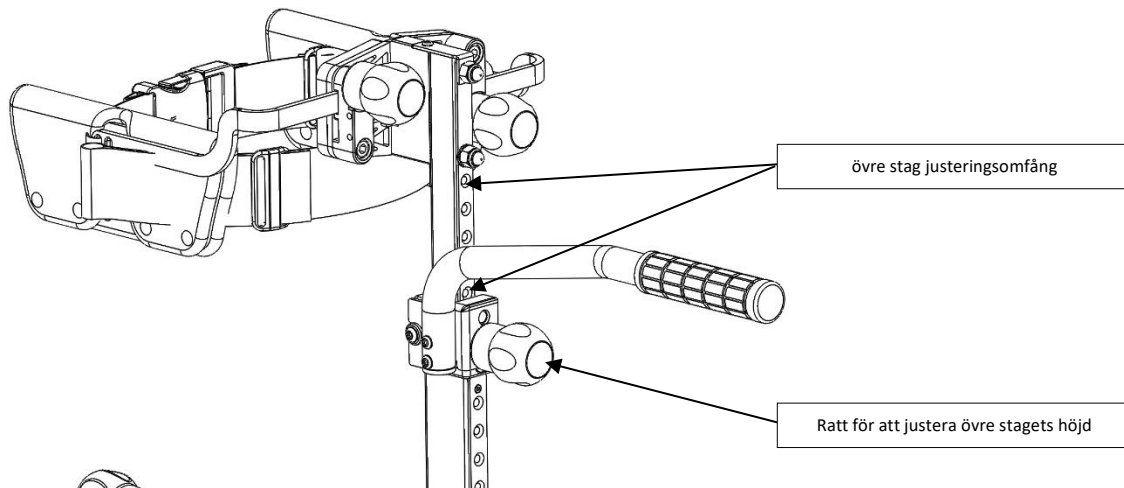

Figur 9: Xplore Övre stag

Det övre stagets höjd justeras genom att lossa stagets höjdvred, skjuta staget till önskad höjd och dra åt vredet igen.

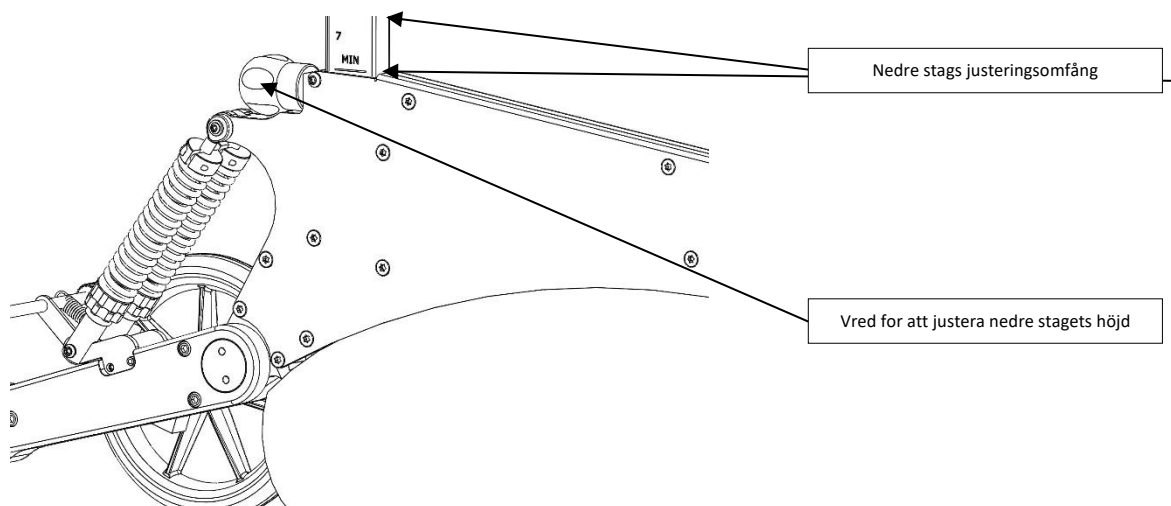

Figur 10: Xplore Nedre stag

Nedre stagets höjd justeras genom att lossa stagets höjdstyrning, ändra stagen till önskad höjd, och dra åt vredet. Se till att staget inte går längre ned än botten på understället.



Viktigt: Se till att staget sänks minst 100 mm in i ramen. Mindre än 100 mm gör staget instabilt.



Viktigt: Xplore får endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.




Viktigt: När man använder manschetter och styrband /remmar och efter justering av stagen, se till att styrbanden /remmar rullar fritt över rullarna. Om inte, justera höjden på U-tuben.



Viktigt: På Small modellen levereras den med två nedre stagdelar. Det kortaste staget används på de minsta Small användarna och det längsta staget används på de högsta Small användarna. När barnet växer kan det finnas ett behov av att byta från den kortaste till den längsta delen av det nedre staget. Kontakta din Made for Movement-representant för att planera detta när det är lämpligt.

7.3 Justera höjden på bröststödet, höftbygeln och sätet


Xplore bröststöd, höftstöd och säte använder samma höjdjusteringsprinciper. Genom att lossa knopparna som håller dem på plats kan de justeras till önskad höjd och sedan dra åt dem igen. Kontrollera att konsolerna som vreden är monterade på är ordentligt fästa i staget.

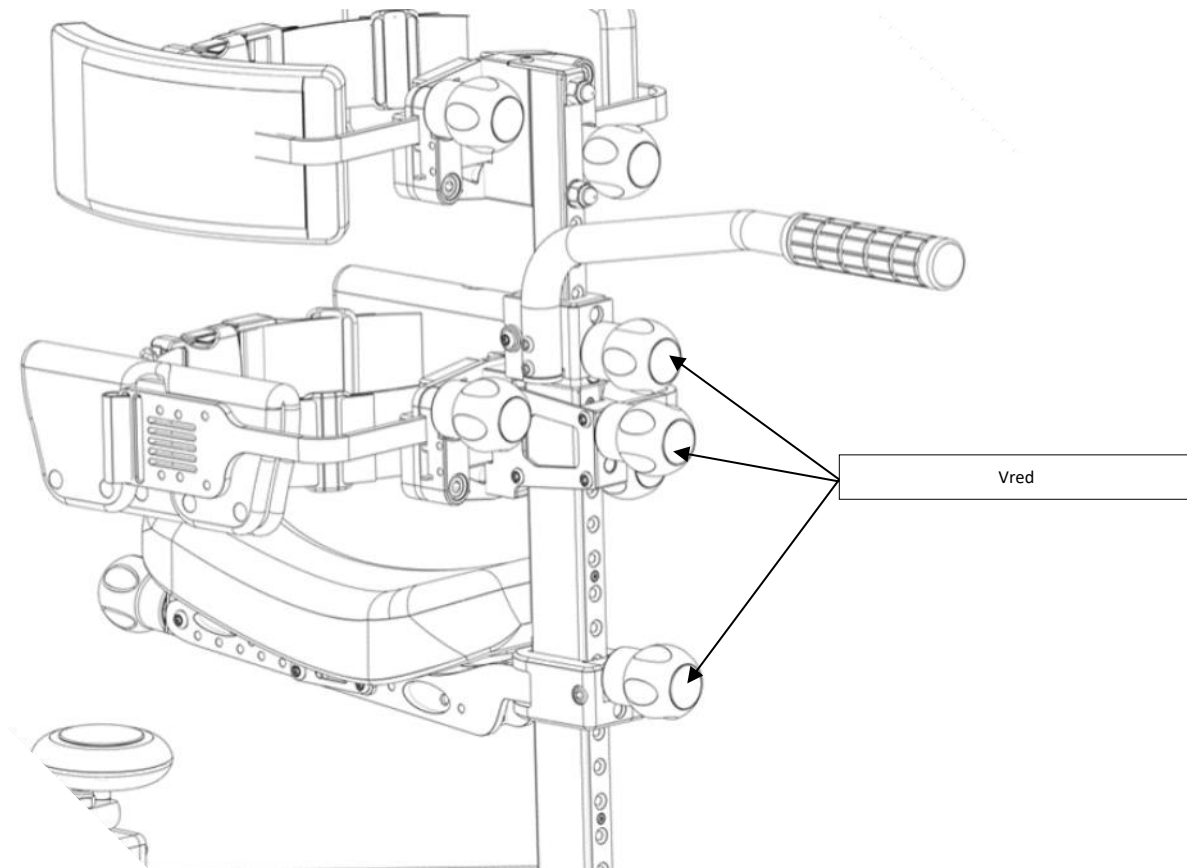

Figur 11: Xplore höjdjustering bröststöd, höftbygel och säte

7.4 Justera bredden på bröststagen och höftbygeln

Xplore Bröststöd och höftstöd använder samma principer för breddjustering. Genom att lossa vreden som håller armarna på bröststödet och höftstödet, kan armarna skjutas utåt eller inåt till önskad bredd. Dra åt vreden igen. Kontrollera att armarna är ordentligt säkra.

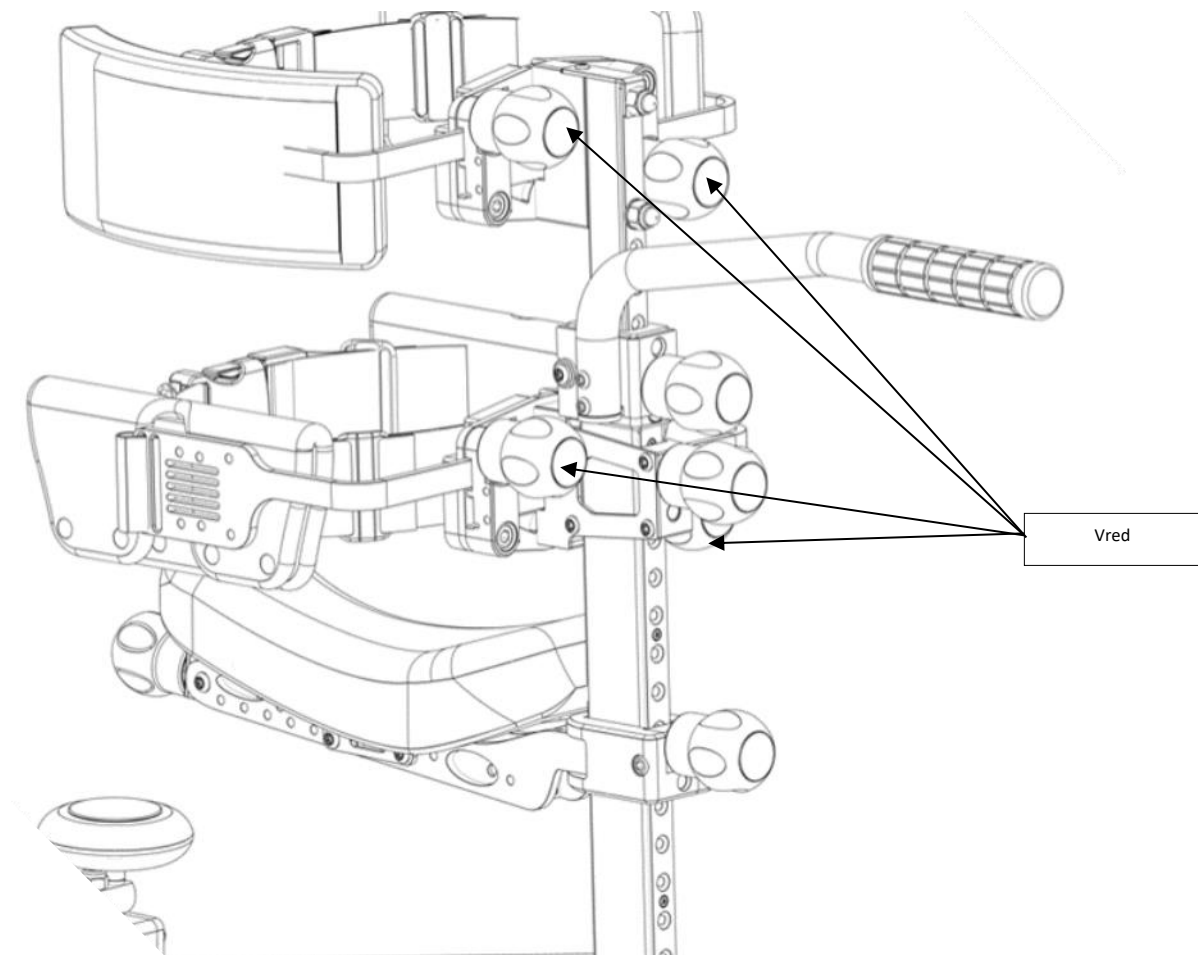

Figur 12: Xplore bröststöd och höftbygel justering

8. Använda Xplore

8.1. Användningstid

Hur länge en användare ska använda Xplore åt gången beror på användarens fysiska och mentala hälsa. Det är assistenter, föräldrar och annan personal runt användaren som ansvarar för att utvärdera detta..

8.2. Utbildning

Det följande förutsätter att Xplore har blivit utprovad och inställd av en representant från Made for Movement eller en annan kvalificerad person. Användarens assistent **SKA** också ha fått den nödvändiga utbildning/upplärning att använda produkten och läst och förstått innehållet i denna bruksanvisningen. Informationen under beskriver hur användaren kommer i och ur Xplore.

8.3. Sko

Xplore ska användas med sko. Se till att skorna sitter på bra vid användning.

8.4. Förberedelse innan användning

Placera Xplore på ett plant underlag och tryck på bromsen. Se till att alla spännen är öppna innan du flyttar användaren till Xplore. Kontrollera att sätet är i rätt höjd. Kontrollera att alla stöd och sätet sitter bra fast.

8.5. Hur kommer användaren i Xplore

Det är 3 primära sätt hur användaren kommer i Xplore; lätt assisterat/lyft, genom personförflyttning eller genom användning av lyftremmar/lyftsele. Gemensamt för alla metoder är att användaren förflyttas till Xplore genom att användaren placeras på sätet. För de minsta och lättaste användarna kan det vara enklast att lyfta användaren till sätet. För tyngre användare kan dessa assisteras över till sätet om de har en funktionsnivå som tillåter det. Användare som behöver mer stöd kan förflyttas över med hjälp av förflyttningsteknik. För tyngre användare kan det vara aktuellt att använda lyftremmar/lyftsele för att trygga förflyttningen och skona medhjälpare/assistenters rygg.

8.6. Säkra användaren i Xplore


Använd bromsen genom att sakta trycka på bromsspaken. (Tryck spaken uppåt för att lossa bromsen). Användaren är fästs med ett bröstbälte och höftbälte omedelbart efter att användaren har flyttat till sätet. Fäst först bröstbandet och kläm fast spännet på bröstbandet tills ett klick hörs och känna efter att spännet sitter ordentligt. Fäst sedan höftbältet genom att kontrollera att det nedre höftbältet vänder bakåt och att bältet är placerat ungefär i mitten av användarens höft. Det övre höftbältet ska fästas framför användaren med fästklämmorna monterade på bältet. Tryck dem tillsammans tills ett klick hörs och känns efter att låset är ordentligt på plats. Användaren är nu säker i Xplore



Observera att sätet måste vara monterat hela tiden för att användaren ska vara säker i produkten. Om du tar bort sätet kan användaren glida ner och ut ur produkten. Observera också att användaren alltid är säkrad på sätet av assistenten tills bälten sitter fast.



Användaren ska ALLTID använda bröstbältet så länge användaren är i Xplore. Om det uppfattas att bältet hindrar användarens rörelsemönster, lossa lite på det och eventuellt sänka det något. Då har användaren bättre rörelsefrihet och samtidigt säkerställer att användaren inte faller ur produkten.

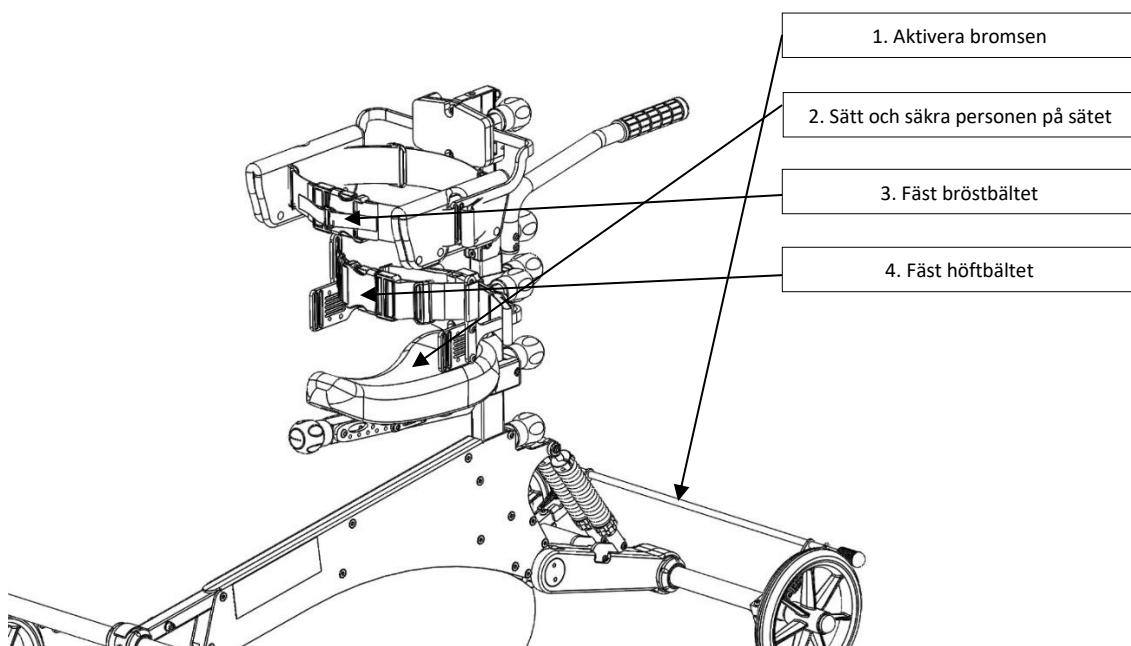

Figur 13: Xplore Ordningsföljd för att säkra användaren

8.7. Hur användaren kommer ur Xplore

Kör Xplore nära området där användaren ska flyttas.

Det är 3 primära sätt hur användaren kommer ur Xplore; lätt assisterat/lyft, genom personförflyttning eller genom användning av lyftremmar/lyftsele. Gemensamt för alla metoder är att användaren förflyttas ur Xplore genom att använda lyft eller förflyttas från sätet till stol, rullstol, säng eller liknande. För de minsta och lättaste användarna kan det vara enklast att lyfta användaren direkt ur sätet. För tyngre användare kan dessa assisteras över från sätet om de har en funktionsnivå som tillåter det. Användare som behöver mer stöd kan förflyttas över med hjälp av förflyttningsteknik. För tyngre användare kan det vara aktuellt att använda lyftremmar/lyftsele för

att trygga förflyttningen och skona medhjälpare/assistenters rygg. Vid användning av lyftremmar/lyftsele, ska dessa fästas i användare och i lyft, före bröst och höftbälte i Xplore lossas för säker förflyttning.



Se alltid till att användaren är säkrad av en assistent i alla led genom hela förflyttningen förflyttningen när bältena i Xplore inte är fastsatta på användaren.

9. Utförande av individuella justeringar och efterjusteringar

9.1. Individuell justering / utprovning

- Xplore är ett personligt hjälpmedel och ska endast användas av den personen hjälpmedlet är anpassat till.
- Xplore får endast anpassas av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.

9.2. Justering uppföljning

- Xplore justeras för tillväxt vid behov.
- Xplore får endast justeras om av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.


10. Transport

Xplore kan demonteras för packning eller transport utan att ändra inställningarna.

När du tar bort / installerar bakaxeln och staget behöver du följande verktyg:

En speciellt verktyg för bakaxeln.

Demontering:

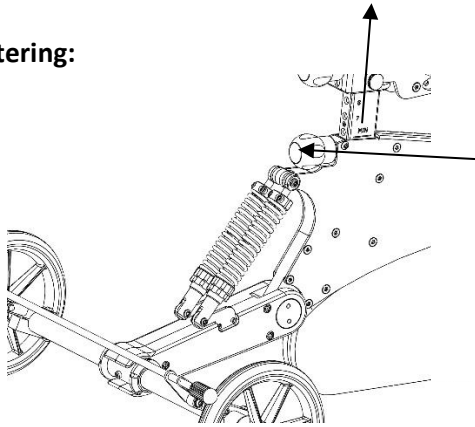


Demontering av staget:

Lossa på vredet ovanför fjädrarna. Lyft ur staget ut ur ramen.

Tips: För att placera staget tillbaka i samma position, räkna antal hål på staget mellan understället och övre stagets justeringskonsol.


Figur 14: Xplore Vredet för att lossna på staget

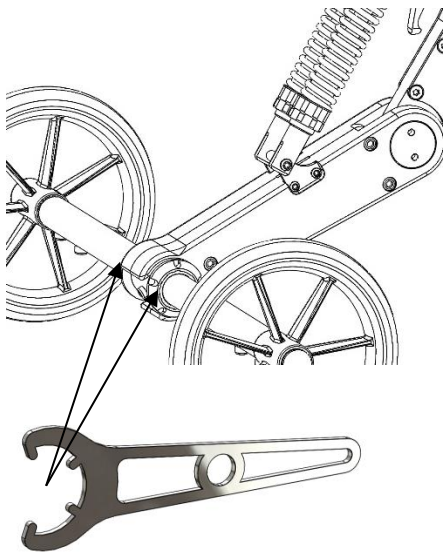

Demontering av bakaxel:

Lossa de koniska muttrarna och dra loss bakaxel bakåt.

Figur 15: Xplore Verktyg för att lossa på koniska muttrar på bakaxeln.

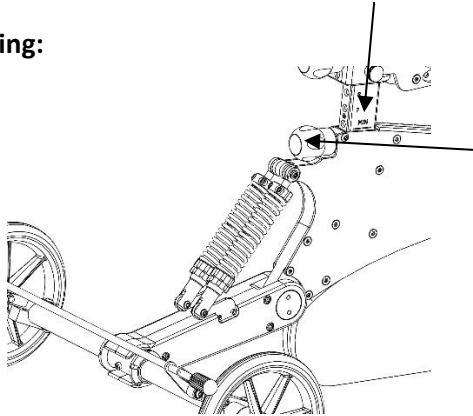
Montering:**Montering av staget:**

Lossa på vredet ovanför fjädrarna. Lyft staget tillbaka i ramen.

Räkna antal hål i staget för rätt placering.

Dra åt vredet och se till staget sitter fast bra.

Figur 16: Xplore Montering av staget

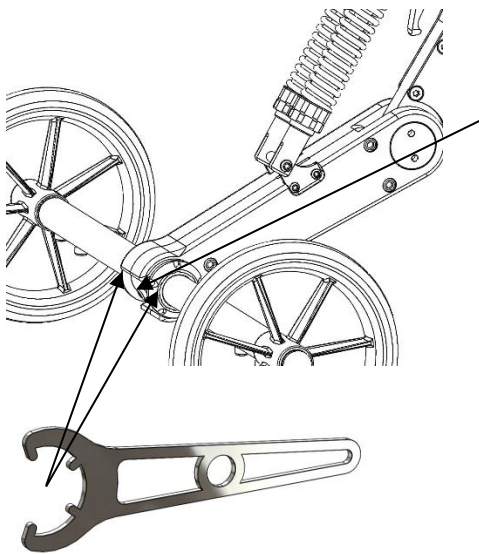
**Montering av bakaxel:**

Placera bakaxeln in i trailingarmens öppning.

Dra åt de koniska muttrarna på båda sidor av trailingarmen med specialverktyget.

Se till att bakaxeln sitter fast bra.

Figur 17: Xplore Användning av verktyget för att dra åt de koniska muttrarna.

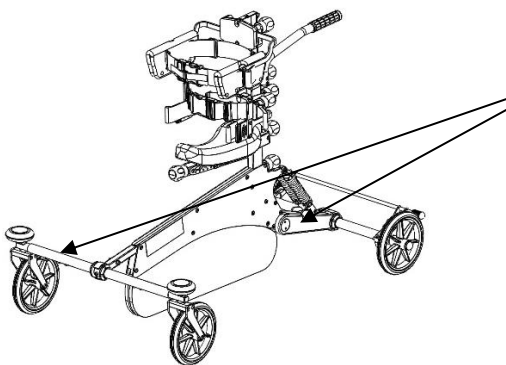Lyfta/bära produkten:**Lyftpunkter:**

Lyft produktet genom att hålla i framaxeln och trailingarmen som håller bakaxeln.

Figur 18: Xplore Lyftpunkter.

11. Teknisk information

11.1. Märkning



Figur 19: Xplore Small Produktskylt



Figur 20: Xplore Medium Produktskylt



Figur 21: Xplore Large Produktskylt

11.2. Specifikationer och dimensioner Xplore

Xplore	Small	Medium	Large
Max. Produkthöjd:	94 cm	110 cm	140 cm
Max. produktlängd:	103 cm	114 cm	127 cm
Max. produktbredd:	55 cm	70 cm	80 cm
Produktvikt:	12,9 kg	16,7 kg	19 kg
Hjul:	100 x 22 mm	185 x 28 mm	185 x 28 mm
Max. vikt på användare:	30 kg	50 kg	80 kg
Rekommenderad längd på användare:	70*-120 cm	110-150 cm	140-180 cm
Höftbredd:	16-26 cm	20-32 cm	28-45 cm
Övre justering stag:	0-25 cm	0-25 cm	0-32 cm
Nedre justering stag:	0-9 cm	0-12,5 cm	0-16,5 cm
Säte höjd minimum:	31 cm (27 cm*)	43 cm	45 cm
Säte höjd max:	50 cm	70 cm	88 cm
Svängradie:	100 cm	120 cm	130 cm
Användningsområde: Inomhus	Ja	Ja	Ja
Användningsområde: Utomhus i torrt väder	Ja**	Ja	Ja
Minimum produkthöjd ***	52cm u.hs 62cm m.hs	72cm u.hs 82cm m.hs	97cm u.hs 107cm m.hs
Säte bredd	7cm	max. 13.5cm min.7cm	max. 13.5cm min.7cm
Säte djup	22cm (paddingsete)	30cm (sadel)	30cm (sadel)
Bröststöd justeringsintervall	42cm	40cm	38cm
Bröststöd höjd mätt från marken	Min: 45cm Max: 87cm	Min: 65cm Max: 105cm	Min: 95cm Max: 133cm
Vikt med tillbehör****	15,9kg	20,4kg	22,4kg
Vikt standard	12kg	16,5kg	18,5kg
Leveransstorlekar (dimensioner och vikt):			
Stag*****	47x47x16.5cm 5kg	59x47x16.5cm 5.9kg	84x47x30cm 7.2kg
Underställ	93x25x5,5cm 4.3kg	103x33x5,5cm 5.3kg	116x33x5,5cm 5.8kg
Bakaxel	50x15x10cm 1.7kg	70x20x23cm 2.6kg	77x20x23cm 3.2kg

Framaxel	57x20x9cm 1.9kg	70x26x8cm 3kg	77x26x8cm 3.1kg
Profilmål:			
Nedre stag	5x2cm	5x2cm	5x2cm
Övre stag	2,5x1,5cm	2,5x1,5cm	2,5x1,5cm
Ramdel framaxel	2x2cm	2x2cm	2x2cm
Material som kommer i kontakt med användare över tid (applied parts):	Material:	Polstring tjocklek:	Polstring tjocklek:
Bröstpolstring	Neopren/Polyester	0,65 cm	0,65 cm
Sätets polstring	Neopren/Polyester	0,65 cm	2,5 cm
Underbens polstring	Neopren/Polyester	1 cm	1 cm
Bendelare	Polycotton/Polyethylene	0,06 cm	0,9 cm
Rygg polstring	Polyetylen		1 cm
Material som kan komma i kontakt med assistent och användare över kortare tid (accessible parts)	Materiale:	Stoff tykkelse:	
Nylonband	Nylon	0,1 cm	
Aluminium	AA6082-T6, EN-AW5754, AA6061	N/A	
Rostfritt stål	AISI304/1.4301,	N/A	
Stål	Domex 600, S355, SS2384 spring steel	N/A	
Plast	POM, Polycarbonat, Polypropylen, Nylon, Acetal	N/A	


* För de allra minsta brukarna fästs sättespaddingen direkt på ramen för att möjliggöra användning av Xplore så tidigt som möjligt. Sätet tas bort och förvaras under denna period. När användaren växer flyttas sätet tillbaka till konsolen som är fäst vid sittfästet på staget igen.

** Xplore Small har mindre hjul än Medium og Large. Dessa är inte gjorda för att gå över kanter, gå i backar med eller till att användas på ojämna underlag som grus. Utomhusanvändning av Xplore Small skall göras på plant underlag utan hinder. Vid användning av Xplore Small utomhus skall användare hållas under kontinuerlig uppsikt.

*** Förkortningar: u.hs = utan huvudstöd. m.hs = med huvudstöd

**** Med följande tillbehör: Ledsagarhandtag, stödhandtag med fäste, polstringar, huvudstöd, envägslager, riktningsspärr.

***** På Small modellen kommer den med två nedre stagdelar i olika längder, där den kortaste ersätts med den längsta när barnet växer.

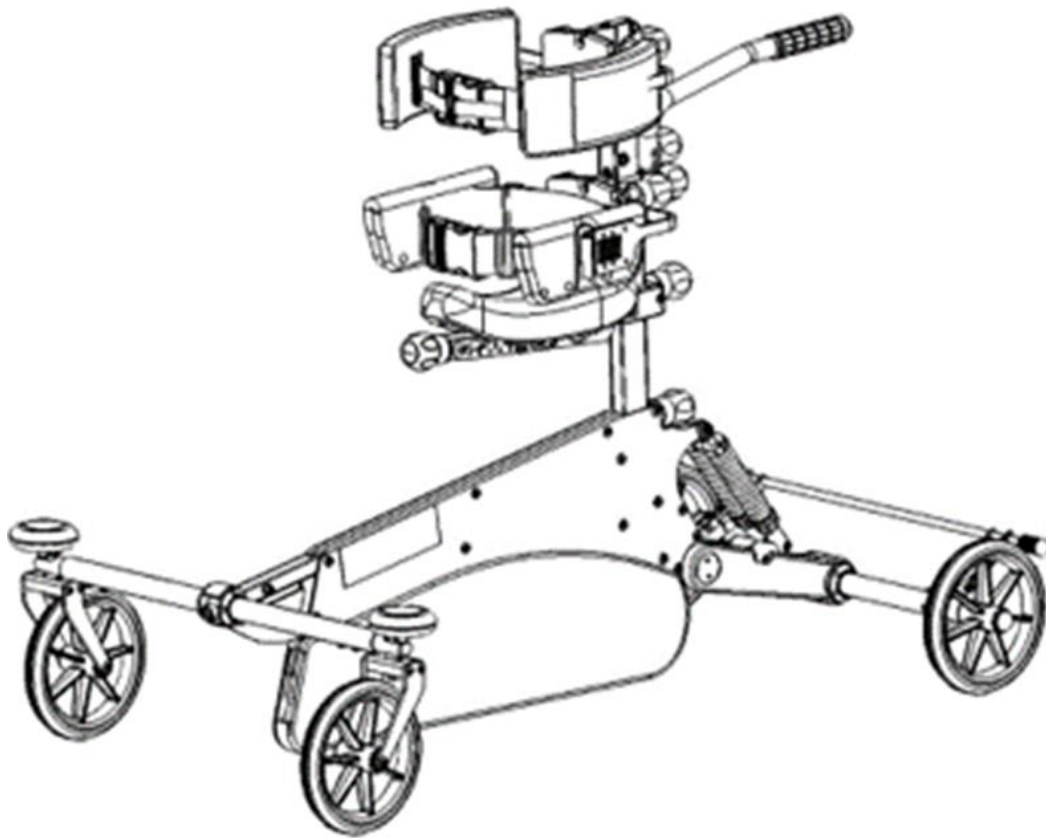


Figur 22: Xplore komplett

12. Ekstrautrustning

12.1. Huvudstöd


Höjdstjerbart nackstöd kan monteras på bröststödästet. Höjden justeras genom att lossa knapparna som håller nackstödästet, justera sedan höjden och dra åt knapparna igen för att fixa nackstödet i önskat läge.

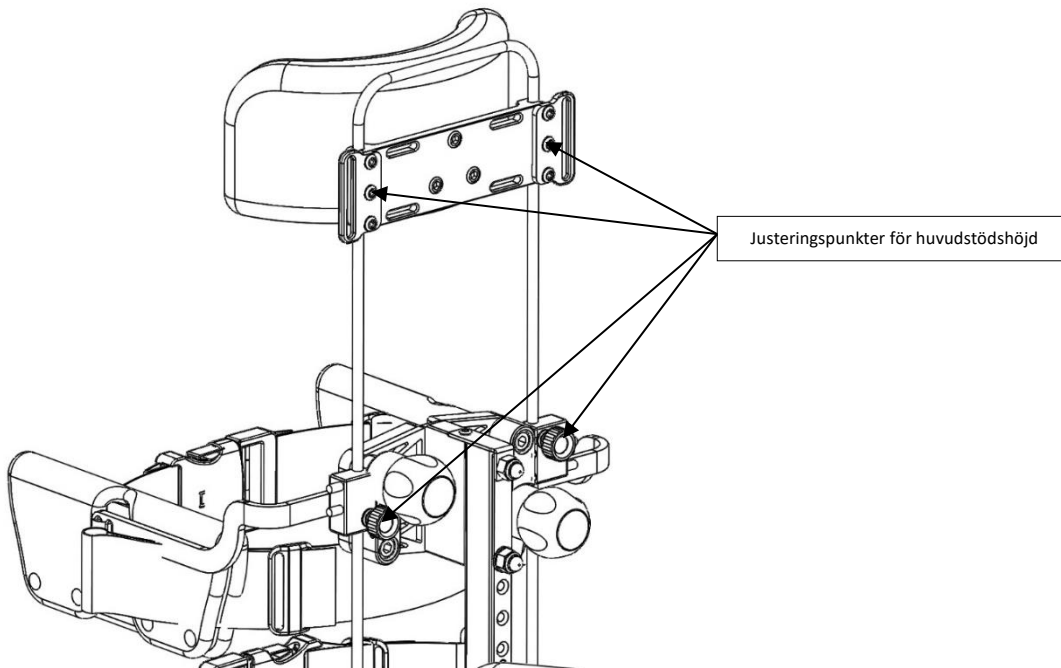

Figur 23: Xplore huvudstöd

12.2. Sidohandtag


Sidohandtag kan monteras på höftstaget om en användare behöver något att hålla fast vid under gång.

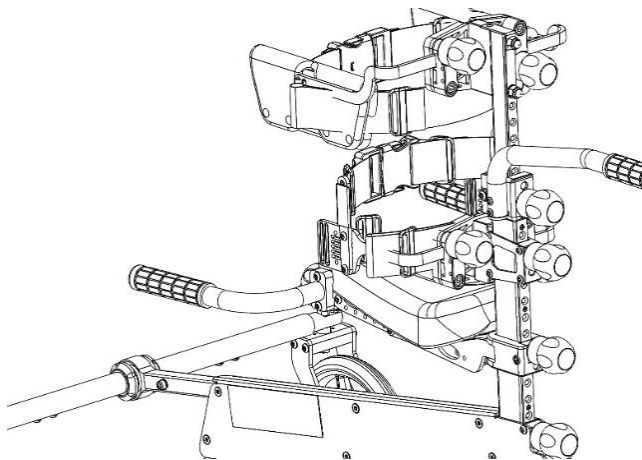

Figur 24: Xplore Sidohandtag

12.3. Ledsagarhandtag

Övre stagets justeringkonsol kan utökas för att montera på en konsol som möjliggör ledsagarhandtag. Ledsagarhandtaget skruvas fast i staget genom att dra åt vredet på konsolen. Genom att justera höjden på nedre staget kan höjden på ledsagarhandtaget justeras.

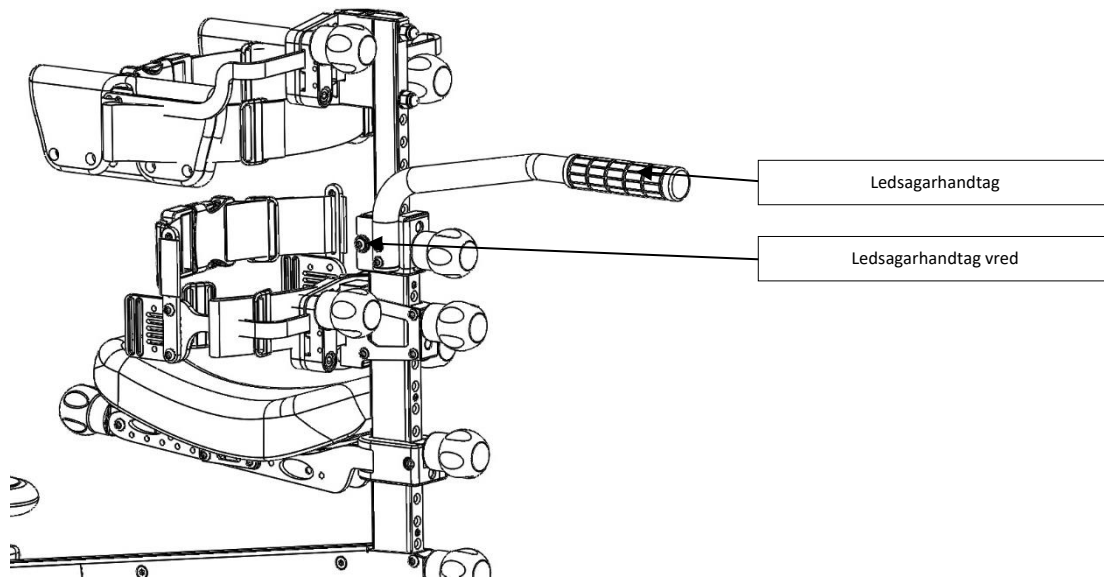

Figur 25: Xplore Ledsagarhandtag

12.4. Korrigeringssystem för lår och fötter

För användare som behöver benkorrigering och positionering i produkten kan ett manschettkorrigeringssystem användas. Manschetten kan fästas runt användarens ben och / eller lår, och de har ringfästen monterade. Manschetten är lindade runt användarens ben och dras åt och fästs med kardborrband. Se till att dessa inte dras för hårt eftersom det är obekvämt och kan begränsa blodflödet till benen.

På Xplore monteras det på spridarrullar på framaxeln, och en u-tub bak på staget. Remmar och/eller resårrem med karbinkrok dras igenom spridarrullarna och u-tub rullarna, och fästs på ringfästet på manschetterna. Remmar/resårrem justeras av en Made for Movement representant så att användaren står bra och stabilt i produkten, och har nog med utrymme för att kunna förflytta sig som önskat.

Remmar/resårrem kan justeras för att anpassa varje användarens behov.

Remmar/resårrem har en rad funktioner:

- Hjälpa till att få bra sträckning i benen
- Korrigering av gångmönster
- Bra stabil och rak position
- Säkra god position för optimal belastning
- Få till en säker och bra gång i produkten

Det kan användas bara remmar eller resårrem - eller en kombination av dessa. Detta värderas utifrån varje enskild användare.


Resårremmar ger användaren mer frihet i rörelsen och mindre korrigering av gångmönstret, medan de fasta remmarna ger mer korrigering av gångmönstret.

Resårremmar används för att få ett mer dynamiskt rörelse mönster. Fasta remmar används ofta för att sträcka ut benen i stående. Detta gör Xplore både till ett gånghjälpmedel, och ett dynamiskt ståhjälpmedel.


När manschetter inte används, så kopplar du helt enkelt inte på dem, och tar bort remmar och resår för tillfället. Spridrullarna och u-tub kan vara kvar på produkten eftersom de inte stör användningen och de är redo för nästa gång de behövs.



Korrigeringssystemets inställning av styrbälten / resår-remmar kräver kunskap och erfarenhet om detta och måste endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.

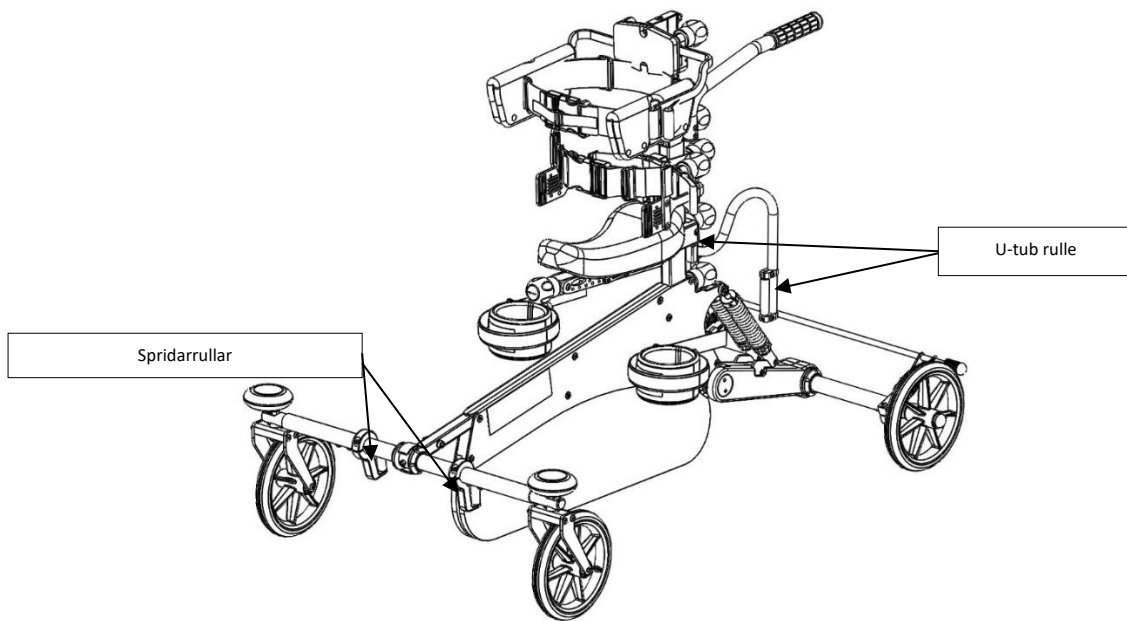


Figur 26: Xplore Spridarullar och u-tub

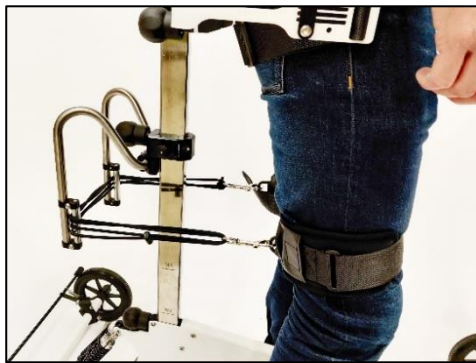

Figur 27: Xplore Spridarullar och u-tub detaljer

12.5. Bröstpöstring

Bröstpöstring kan monteras på bältet under armarna till användaren för att ge tryckavlastning under armarna för användaren.

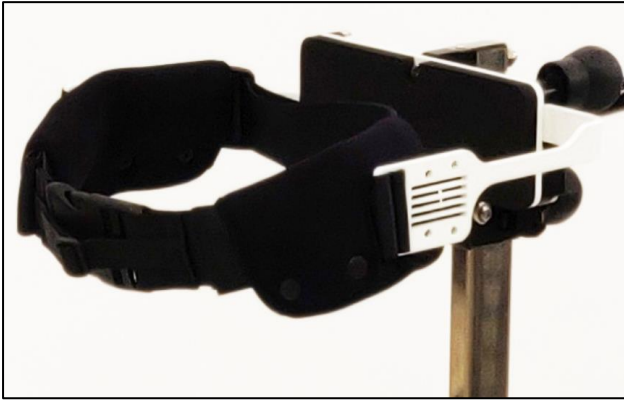

Figur 28: Xplore Bröstpöstring

12.6. Riktningsspärr för hjul

Riktningsspärr kan monteras på framhjulen, så att hjulen låses fast i en rak position. Genom att låsa upp hjulen , kan dessa rotera fritt i 360 grader.


12.7. Envägslager bakhjul

Bakhjulen kan levereras med envägslager, så att Xplore bara kan röra sig framåt. Bakåt låses hjulen. Detta kan vara aktuellt för användare som har utmaningar med att få komma igång med rörelsen framåt.

12.8. Stödhandtag

Stödhandtaget är till för användare som vill ha något att hålla sig i. Stödhandtaget finns i två olika storlekar: 310 mm bredd (standard) och 410 mm bred (bred).

Om nödvändigt kapas längden på stödhandtaget för att passa den aktuella användaren.

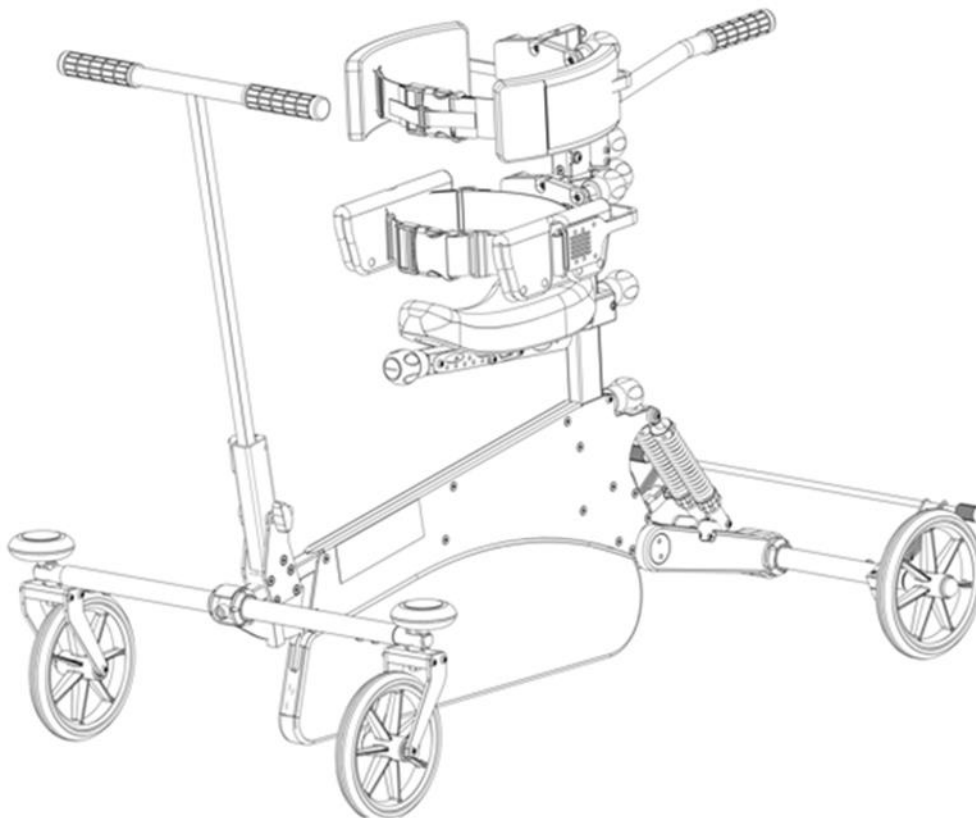

Figur 29: Xplore Stödhandtag

13. Tester och godkännningar för Xplore

Xplore och tillhörande extrautrustning är CE-märkt i enlighet med följande standarder:

EU 2017/745 Medical Device Regulation (MDR)

NS-EN 12182 :2012

SS-EN 12182 :2012

DIN EN ISO 11199-3 :2005 §4.3

NS-EN ISO 14971 :2019

NS-EN ISO 13485 :2016

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Denna bruksanvisning medföljer produkten. Användarmanualen kan också laddas ner från vår hemsida: www.madeformovement.com

14. Avfallshantering

Alle delarna till Xplore kan återanvändas. Produkten skall levereras till godkänd återvinningsstation. Remmar, resår, polstringar och clips kan behandlas som vanligt hushållsavfall.

15. Rengöring och underhåll

a. Rengöring

Xplore kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats med mild tvållösning. Om Xplore används utomhus bör sand och smuts borstas av väl efter användning.

Xplore klarar och tål desinfektionsmedel och kan om nödvändigt desinficeras med kommersiella tillgängliga, eller Läkemedelsverkets / VAH / RKI-listade desinfektionsmedel.

Manschetterna och polstringar kan tvättas i maskin, max. 60°C. Undvik användning av torktummlare.

Använd mild tvål!

b. Justering för användartillväxt och funktionsändring

På grund av användarens tillväxt och användarens eventuella funktionsförändringar måste produkten då och då anpassas av Made for Movement, någon av MFM:s representanter, eller en läkare/terapeut/tekniker/assistent som fått utbildning i hur detta ska utföras.

Fjärrstyrning av enkla justeringar:

För enkla justeringar erbjuder MFM:s representanter fjärrvägledning. Fjärrvägledning ges endast till personer som redan har fått utbildning i hur man gör justeringar när de får produkten. För att säkerställa att detta görs på ett säkert sätt får de vägledning över videosamtal. Denna metod avtalas alltid mellan parterna vid leverans av produkten, så att den som ska göra justeringen kan känna sig säker på att han/hon gör justeringarna korrekt. MFM-representanten ska alltid godkänna justeringarna via videosamtal, så att han/hon visuellt kan kontrollera att justeringarna är korrekta.

c. Inspektion och underhåll

Inspektion

Daglig

säkerhetskontroll:

Utför den dagliga säkerhetskontrollen i kapitel 3 före användning.

Månadsvis

säkerhetskontroll:

Utför säkerhetskontroll månadsvis enligt beskrivningen i kapitel 3 en gång i månaden.

Säkerhetskontroll

funn:

Om saker upptäcks under inspektionen, måste en reparation beställas. Produkten får inte användas igen innan den har reparerats om det inte har överenskommit med representanten att det är OK att använda produkten förrän den har reparerats.

Underhåll

Rengöring:

Se till att alltid hålla produkten ren. Vid behov, desinficera produkten.

Reparationer:

Reparationer och byte av utslitna delar görs av en Made for Movement-representant. Beställ reparationer hos din lokala kontaktperson på Made for Movement.



Viktigt: Om säkerhetskontroll och reparationer inte utförs och reparationer dokumenteras, bryts produktcertifieringen och Made for Movement ansvarar inte längre för negativa händelser, olyckor eller skador som uppstår. Kunden bär detta ansvar i det osannolika fallet att säkerhetskontroll och eventuella reparationer inte utförs. Den tvååriga garantin kommer inte heller att gälla om säkerhetskontroll och reparationer inte utförs.

Underhållsinformation:

Made for Movement utvecklar och producerar unika stå-, aktivitets- och gånghjälpmedel för funktionshindrade. Produkterna är designade med rörliga delar för att möjliggöra smidig drift och enkel och säker användning. Vissa av de rörliga delarna och andra viktiga delar är slitna under användning och måste bytas ut när de är utslitna. Daglig och månatlig säkerhetskontroll utförs för att säkerställa att produkten är säker att använda över tid, och att slitage upptäcks och repareras.

Typiska slitdelar listas nedan. Även andra delar kan slitas ut till följd av personens användnings- och/eller rörelsemönster och dessa måste även bytas ut när de blir utslitna. Reparationer ska beställas om slitage upptäcks och produkten får inte användas igen förrän produkten har reparerats.

Exempel på slitdelar som inte omfattas av garantiperioden är; Hjul, stoppning, remmar, bälten, styrlinor, sätesstoppning, broms.

Exempel på delar som kan bli slitna under en period på 2-5 år*; På understället: Gaffel, dämpare, väggavvisare, spridarrullar, fästen till staget, sidoplattor. På staget: polstringen på ryggplattan, underarmsstöden, höftbyglar, huvudstödsbygeln, huvudstödet. Extrautrustning med polstring, rörliga delar eller delar som är utsatta för starka krafter, kan också bli slitna och bör följaktligen bytas ut om de är slitna.

*Normalt är dessa delar hållbara under produktens förväntade livslängd, men med tanke på att Made for Movement erbjuder rörelse i upprätt läge med belastning för personer som har ett varierat rörelsemönster, vilka delar som behöver bytas på produkten kommer att vara mycket individuella.

Märken är mycket sällan slitna, men om de av någon anledning är slitna och svåra att läsa bör de ersättas med Made for Movement.



Utför inte underhåll när produkten används eller när användaren befinner sig i produkten.

16. Återanvändning

Xplore kan återanvändas till en ny användare efter en avslutad användningsperiod. Om Xplore skall återanvändas, skall produkten levereras tillbaka till Made for Movement eller deras representant. Då utförs en säkerhetsgenomgång återanvändnings service med desinfektion och delar som är slitna byts ut.

Om produkten är äldre än den förväntade livslängden på 5 år, kommer delar som påverkar säkerheten att utvärderas och om så krävs bytas ut.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för återanvändning:

- Justeringar och service har utförts av Made for Movement eller annan auktoriserad representant.
- Xplore har hanterats normalt och använts i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.

17. Garanti

Made for Movement ger 2 års garanti på produkten. Garantin täcker inte tillbehör eller speciallösningar från andra företag än Made for Movement. Vanliga slitedelar täcks inte av garantin.

Produktens förväntade livslängd är 5 år.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att garantin ska gälla:

- Reparationer och underhåll av produkten har utförts av en representant för Made for Movement.
- Säkerhetskontroll och underhåll (kapitel 3 + 15) har utförts och reparationer kan dokumenteras.
- Reparationer som omfattas av garantin måste klargöras med Made for Movement Group AS innan produkten repareras. Garantianspråk måste skickas till Made for Movement inom rimlig tid (max 2 månader). Framställs anspråk efter detta kan rätten till garanti förfalla.
- Produkten har inte byggts om eller reparerats av någon annan än en Made for Movement-representant.
- Produkten har hållits ren.
- Produkten har använts och behandlats i enlighet med denna bruksanvisning.

Om produkten inte skulle fungera tillfredsställande, kontakta Made for Movement eller annan auktoriserad representant på telefon +46(33)210880 eller mejla till info.se@madeformovement.com.




Vänligen meddela Made for Movement om produkten inte fungerar korrekt eller som förväntat. Använd inte produkten förrän den har reparerats.

18. Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.
Se kapitel 13 för godkännanden.

Producent:
Made for Movement Group AS
Rødmyrlia 2
3735 Skien
Norway

Tel. +47 35 50 51 20
Fax +47 35 50 51 21
info.no@madeformovement.com
www.madeformovement.com
BRN: NO 991 237 615 VAT

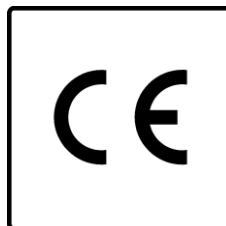

Bilaga 1 – Utbildning av användare och/eller assistent

Utbildning och assistenter

Innan du börjar använda produkten måste användaren eller assistenten utbildas på hjälpmedlet av en representant för Made for Movement.

Endast utbildade användare/assistenter får använda produkten.

Utbildningsprogrammet består minst av följande områden.

Användaren/assistenten har genomgått utbildning inom följande ämnen:

Utbildning:	Utförd: Ja/Nej
Information som anger att endast utbildade assistenter får använda produkten	
Försiktighetsåtgärder, indikationer och kontraindikationer för användning	
Säkerhetskontroll	
Säkerhetsfunktioner	
Fäst och lossa användaren til produkten	
Använd och gå i produkten	
Användning av lyftband	
Användning av bromsen	
Fastsättning och användning av extrautrustning	
Säker demontering och montering av produkten för transport	
Vid användning; observation och kontroll av patienten	
Överlämning av bruksanvisningen och förklaring av vad den innehåller	
Använda QR-koden på produkten	
Bedöma behovet av justeringar i takt med att användaren växer	

Ange N/A (Ej tillämpligt) för ämnen som inte är relevanta i detta fall

Utbildning av andra av superanvändare

En superanvändare kan utbilda andra assistenter/vårdgivare. En superanvändare har utbildats i hur man använder produkten av en Made for Movement-representant och är officiellt godkända för att arbeta med produkten. Superanvändaren kommer att utbilda andra assistenter/vårdgivare i enlighet med bruksanvisningen och använda Bilaga 1 under utbildning.

Assistenter/vårdgivare som har utbildats av superanvändaren ska anges nedan.

Dokumentet nedan, ifyllt, ska förvaras på en säker plats där produkten används, och i enlighet med GDPR så att inga personuppgifter blir offentligt tillgängliga. Dokumentet ska tillhandahållas till Made for Movement på begäran.

Observera att endast personer som har utbildats får använda produkten tillsammans med användaren.

Produktens serienr: _____

Användarinitialer: _____ (användaren är den person (anonymiserad som använder produkten)

Superanvändare (namn): _____ (superanvändaren ansvarar för utbildning av andra assistenter/vårdgivare)


Personer som har mottagit utbildning av superanvändare:	Datum för utbildning:

Bilaga 2 – Monteringsanvisning

Huvuddelarna i Xplore monteras enkelt endast med hjälp av ett specialverktyg och handkraft. Illustrationerna nedan visar hur.



Steg 1

Fäst framaxeln på ramen med specialverktyget. Dra åt båda muttrarna ordentligt.

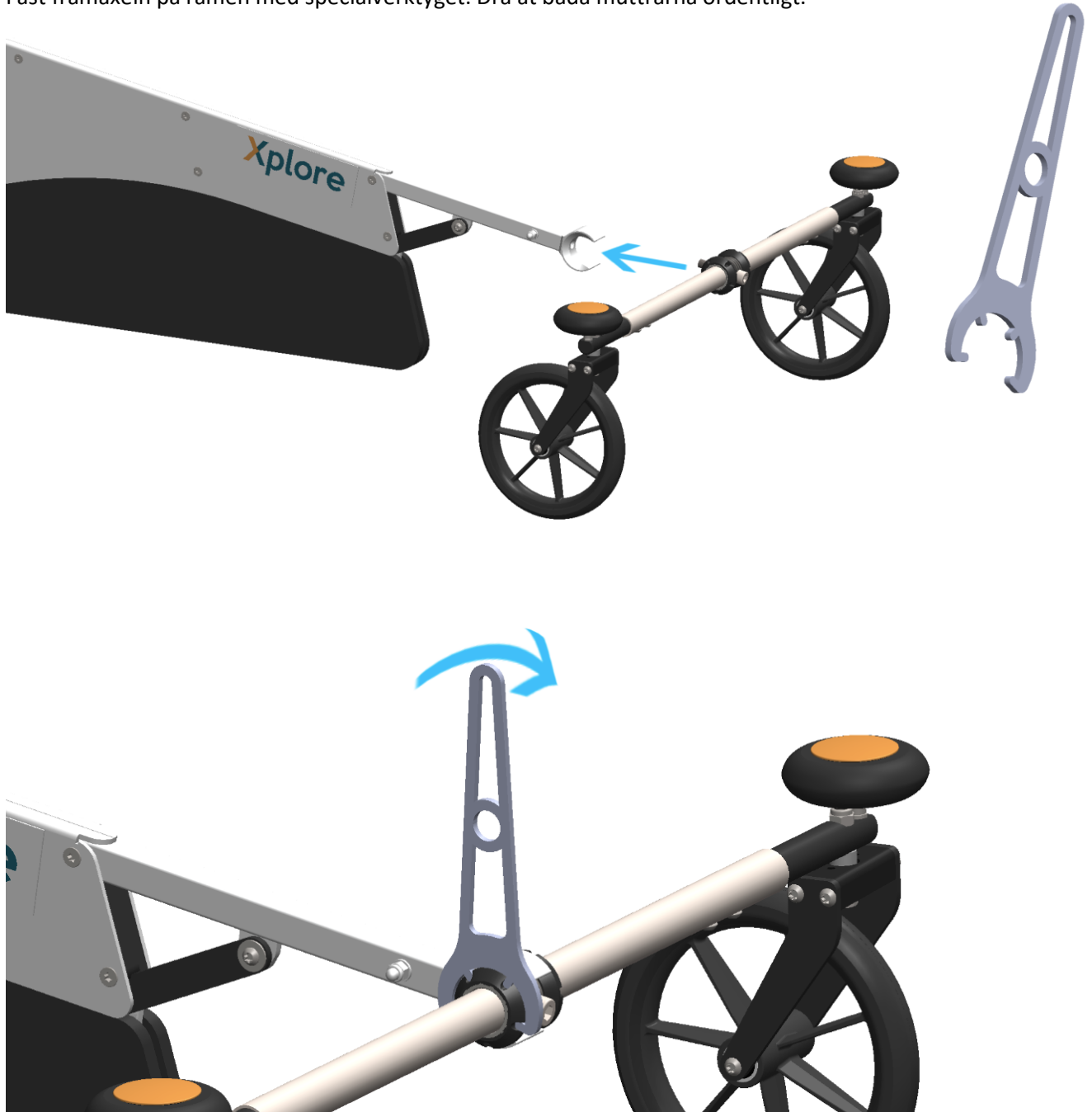

Steg 2


Fäst bakaxeln till ramen med specialverktyget. Dra åt båda muttrarna ordentligt.

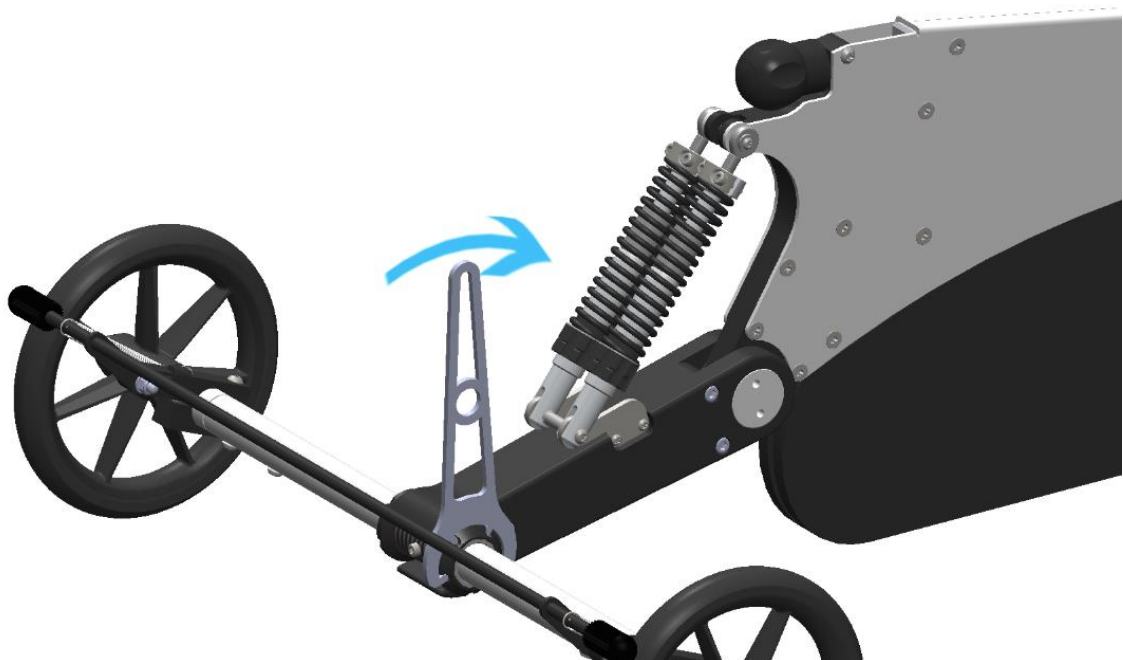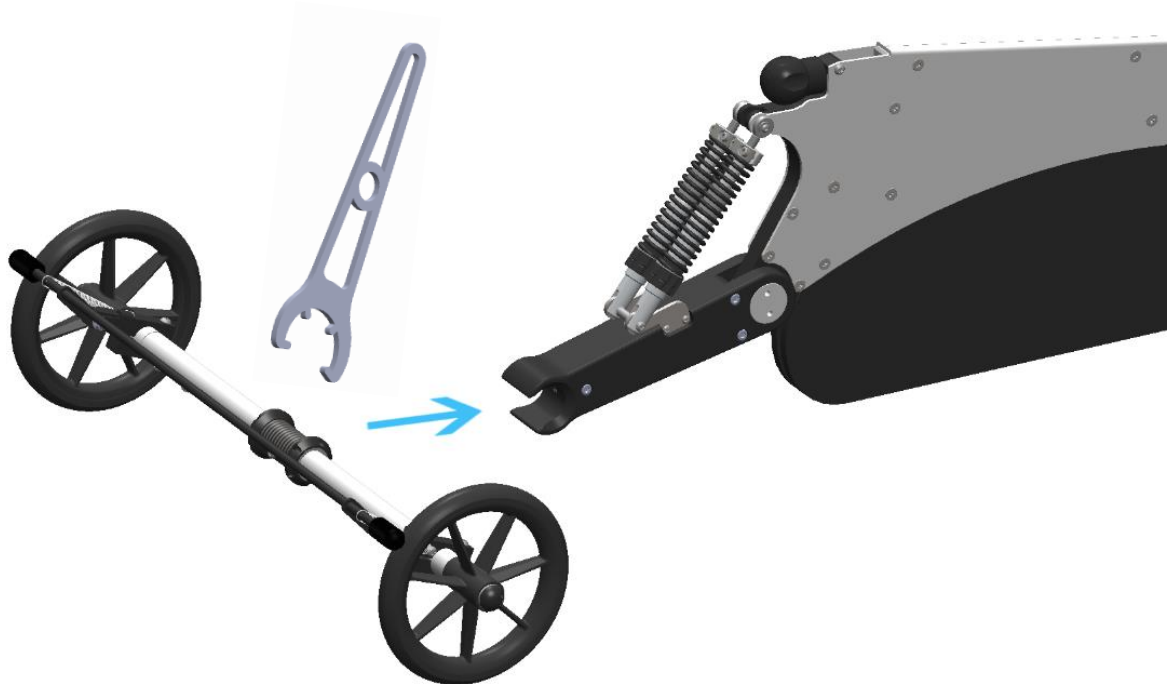

Steg 3

Sits: Skjut in sätet i sätesfästet.

Ledsagarhandtag: Skruva loss åtdragningshandtaget (1.). För in det handtaget i fästet (2.) Sätt in och dra åt åtdragningshandtaget igen.

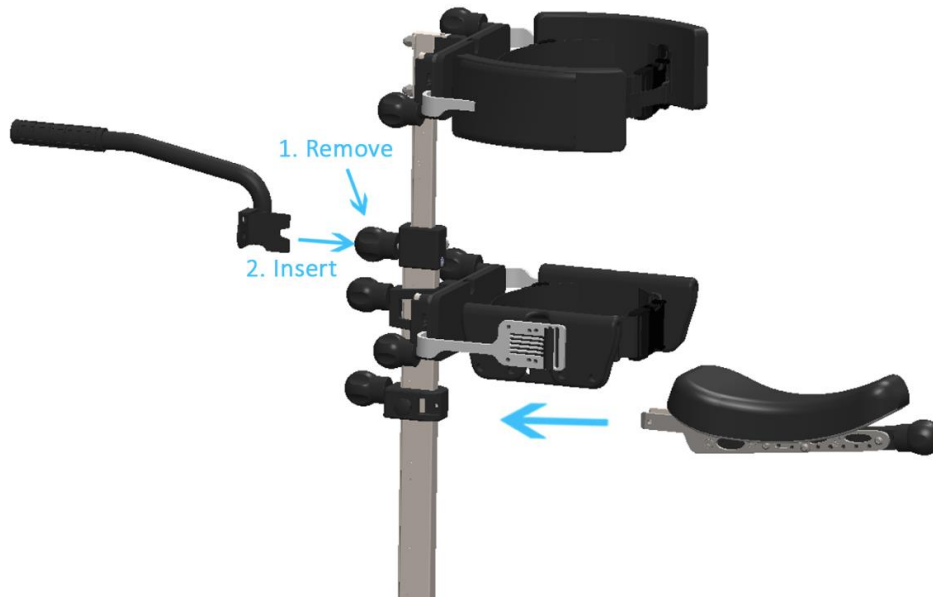

Steg 4

Lösa åtdragningshandtaget som är fäst vid chassit och skjut in kolonnen i chassit. Skruva fast åtdragningshandtaget för att säkra staget. Dra åt ordentligt.



Steg 5

Produkten är klar att användas



Bilaga 2 - Rev 01/20 CTS 11.11.20