

INNOWALK

Muliggjør aktivitet hver dag

INN OG UT
HURTIGGUIDE






Pre-check

Pre-check er en sjekk som utføres for å oppdage slitasje på viktige deler. De viktigste delene blir sjekket daglig før bruk, mens andre deler blir sjekket for slitasje en gang i måneden



For flere tips om hvordan du utfører pre-check, skann QR-koden og gå gjennom de gitte instruksjonene for pre-check.

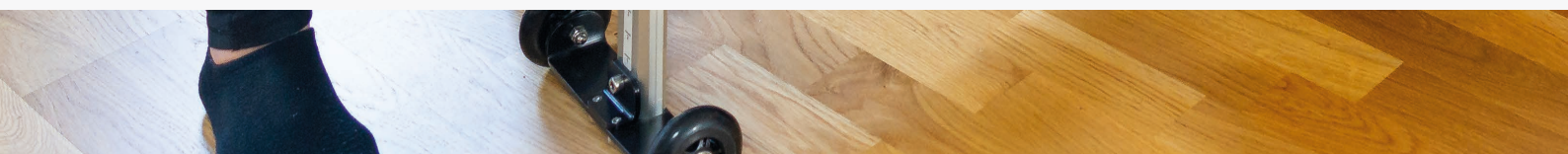

Forberedelse før forflytning

- Slå på strømmen
- Plasser Innowalk i sittende stilling
- Sving setet ut og legg ned leggbøylene (A)
- Åpne alle stropper, bryst- og hoftestøtte, løsne føringsreimen


Dersom svingbart sete brukes for mer selvstendig forflytning

- Posisjoner fotplaten på inngangssiden i laveste posisjon i gangsyklusen
- Vri det svingbare setet mot ønsket inngangsside (B)
- Juster setet til ønsket høyde med fjernkontrollen for enklere forflytning fra f.eks rullestol (størrelse M og L)

Dersom heis brukes til forflytning

Bruk tilt-funksjonen for å få plass under Innowalk til "beina" på personløfteren (ikke nødvendig dersom takheis brukes)

A

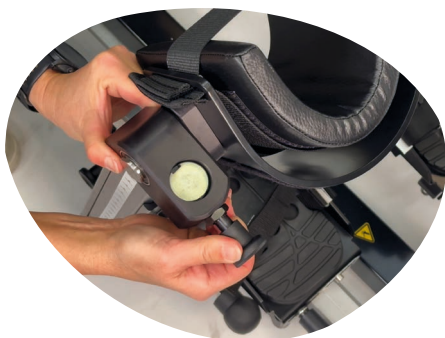

Trekk ut håndtaket (1), løft opp (2) og sving leggbøylene utover



Trekk ut håndtaket (1) og senk leggstøtten

B



Trekk ned håndtaket (1) og vri setet

Forflytning til Innowalk

- Forflytt brukeren til setet og støtt personen frem til hen er sikret av bryststøtten
- Sikre bryststøtten og fest hoftebeltet løst
- Dersom svingbart sete brukes, øk sittehøyden og vri setet til utgangsposisjon (C)
- Fest stroppene over føttene (D)
- Fest leggstøtten (E)
- Fest føringsreimen (F) og stram den til definert lengde
- Flytt brukeren fra sittende til stående posisjon
- Fest hoftebeltet i stående (G)



Forflytning ut av Innowalk

- Løsne hoftebeltet
- Senk til sittende posisjon
- Løsne stroppene over føttene
- Løsne føringsreimen og sving bort leggbøylene

Dersom svingbart sete brukes for mer selvstendig forflytning

- Vri setet til foretrukket side
- Senk setet til foretrukket posisjon for forflytning
- Løsne bryststøtten
- Forflytt personen ut av hjelpemiddelet

Dersom heis brukes til forflytning

- Fest stoppene/seilet til heisen
- Løsne bryststøtten
- Forflytt personen ut av hjelpemiddelet

INNOWALK

**Ta kontakt med din Made for Movement-
representant dersom du trenger
assistanse ved bruk av Innowalk.**

 +47 35 50 51 20

 madeformovement.com/no

Med forbehold om trykkfeil / MfM-NO-0324 / © 2024 Made for Movement AS Alle rettigheter forbeholdes