

Checklista före användning

✓ Säkerhetskontroll av produkten skall utföras före varje användning av Innowalk

✓ Efterdra och fäst eventuella lösa delar och skruvar. Kontrollera upprensningss funktion och att inte

gåremmen är skadad

✓ Kontakta Made for Movement eller din hjälpmedelskonsulent om det är oljud eller om något har gått sönder

Förflyttning av användaren in i Innowalk

1



Innowalk ska vara i sittande position. Öppna alla bälten och spännen. Förflytta användaren manuellt eller med hjälp av personlyft.

3



Fäst bälstoden och remmen.

4



Fäst underbensbyglarna och gåremmarna.

5



Placera hälen längst bak på fotplattan.



Dra åt och fäst remmarna över skorna.

2



Placera användaren långt bak på sitsen.

OBS



För Innowalk Large; Fäst antiöversträck remmen på underbensbygeln.

6

VIKTIGT! Kontrollera att remmen har rätt spänning innan användaren kommer upp i stående.

Innowalk Extra Small



Ställ fötterna parallellt och lossa/öka spänningen på remmen med hjälp av frikopplingen

Innowalk Small



Tryck in röd knapp och dra ut låset. Justera med handtaget till rätt position. Remmen spänns genom att dra handtaget neråt.


Innowalk Medium/Large



Veva på handtaget till rätt position vid stoppskruven. Remmen spänns genom att veva medsols.

Viktigt! Det är viktigt att handtaget står i samma position varje gång produkten ska användas.

7

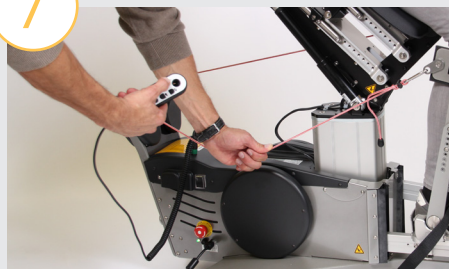

Håll ett tryck på gå remmen när användaren förflyttas från sittande till stående. Kontrollera att gå remmen är tillräckligt sträckt när användaren är i stående position.

8



Fäst höftbältet.

✓ Starta gångrörelsen och justera till rätt hastighet.

✓ Kontrollera att användaren står och går i en bra position.

Montera på nödvändiga tillbehör

Bord



För fram bordet och se till att det går i lås.

Axelremmar



Fäst axelremmar.

Antiöversträck



Fäst rem för antiöversträck på underbensbygeln.

Handtag



Handtag för armrörelse.

Våra erfarna hjälpmedelskonsulenter vägleder till optimal förflyttningsteknik för både barnet och assistenten.

VIKTIGT!

Hantering av Innowalk och användare i detta hjälpmedel skall endast göras av personer som fått utbildning av en hjälpmedelskonsulent från Made for Movement.

För mer information, se bruksanvisningen för Innowalk eller kontakta din hjälpmedelskonsulent från Made for Movement.


Förflyttning av användaren ut ur Innowalk

1



Öppna bordet, lossa axelremmar, rem för antiöversträck och lossa höftbältet.

2

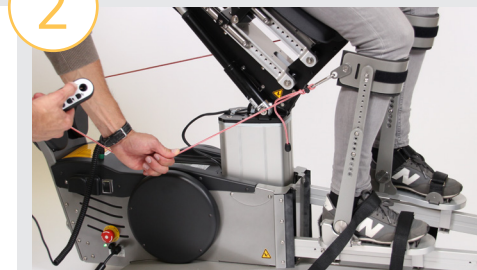

Håll ett tryck på remmen när användaren sänks ner till sittande position.

3



Lossa fotremmar.

4



Lossa gå remmen och underbens byglar.

5



Lossa bröstbälte och bälstöd och förflytta användaren ur Innowalk manuellt eller med hjälp av lyft.



Kontakta oss gärna för
mer information

+ 46 33 21 08 80

info.se@madeformovement.com

www.madeformovement.com



INNOWALK

In och Ur Quick Guide

